

Hospital o Institución: H.B.Z. No. 30 IMSS Iztacalco
Descripción del equipo: Ventilador Volumétrico
Lugar y Fecha: CDMX Iztacalco

Folio: 1834 C

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	66882	Inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Refacciones instaladas



Código	Descripción	Código	Descripción
RS02000A1			Kit Mantenimiento
G95001000			Celda de Oxígeno
E96512000			Baterías

Actividad realizada

Se realiza Calibración de Sensor de flujo inspiratorio y espiratorio.
Se cambia celda y se realiza calibración de FiO2.
Se calibra PEEP y se revisa funcionalidad.
Se revisa estado general del equipo, se cambian baterías y se cambia estado del sistema electrónico, sistema neumático y sistema mecánico. Se efectúa Reset de Horas.
Se realizan Pruebas de Funcionalidad conforme a la rutina del mantenimiento anexo.
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo. Para lo que fue diseñado. Queda operando al 100%. Equipo funcionando al 100%.

Luis Pedro Páez Andrade

Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital

Número de Contrato: 019GYR019N1824-008-00

Código: F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución: H.G.Z. 30 IMSS Iztacalco

Folio: 1892 C

Descripción del equipo: Ventilador Volumetrico

Lugar y Fecha: CDMX Iztacalco

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretion 4000	65167	inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Código	Descripción	Código	Descripción
		R502000 A1	Kit de Mantenimiento
		695001000	Celda de Oxígeno

Actividad realizada

Se realiza Calibración de Sensor de Flujo inspiratorio y espiratorio.
Se cambia celda y se realiza calibración de FiO2.
Se calibra PEEP y se revisa funcionalidad.

Se revisa estado general del equipo y se corrobora función del sistema electrónico, sistema neumático y sistema mecánico. Se efectúa Reset de Horas.

Se realizan pruebas de funcionalidad conforme a la rutina del mantenimiento anexo.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Queda operando al 100%. Equipo funcionando al 100%.

Luis Pedro Casas Andrade

Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital

Hospital o Institución: H.G.Z. No. 30 IMSS Iztacalco
Descripción del equipo: Ventilador Volumetrico
Lugar y Fecha: CDMX Iztacalco

Folio: 1831 C

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	65658	Inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Código	Descripción

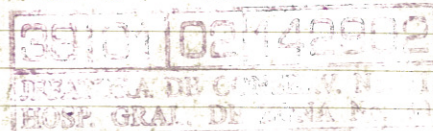
Refacciones instaladas

Código	Descripción
R502000A1	Kit Mantenimiento
695001000	Celda de O ₂

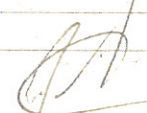
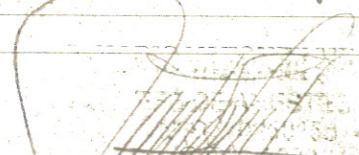
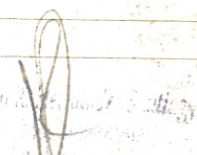
Actividad realizada

Mantenimiento preventivo realizado. Efectuando calibración de Sensores de flujo, Calibración y cambio de celda para el sensado de FiO₂, Reset de horas por mantenimiento, verificación de estado físico, verificación de sistema electrónico y Verificación de sistema neumático.

Se realizan pruebas de funcionalidad con instrumental certificado y conforme a la rutina de mantenimiento anexa.



El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo. El equipo la función de área de diagnóstico, quedando operando al 100%.

 Luis Pedro Casas Andrade		
Ingeniero(a) de servicio	Responsable de área usuaria	Responsable del Hospital

Hospital o Institución: H.G. Z. 30 IMSS Iztacalco
Descripción del equipo: Ventilador Volumetrico
Lugar y Fecha: COMA Iztacalco

Folio: 1889 C

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	65413	Inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Código	Descripción

Refacciones instaladas

Código	Descripción
R502000A1	K.it de Mantenimiento
695001000	Celda de Oxígeno
E96512000	Baterías

Actividad realizada

Se realiza Calibración de Sensores de Flujo inspiratorio y espiratorio.
Se cambia celda y se realiza calibración de FiO2.
Se calibra BEEP y se verifica funcionalidad.
Se revisa estado general del equipo, se cambian baterías y se corrobora función del Sistema Electronico, Sistema neumatico y sistema mecanico. Se efectua Reset de Horas.
Se Realizan Pruebas de Funcionalidad conforme a la rutina de mantenimiento anexa.
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Queda Operando al 100 %. Equipo funcionando al 100 %.

Luis Pedro Casas Andrade

Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital

Hospital o Institución: H.G.Z. 30 IMSS Iztacalco
Descripción del equipo: Ventilador Volumétrico
Lugar y Fecha: CDMX Iztacalco

Folio: 1891 C

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	65593	inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Código	Descripción	Código	Descripción
		R502000A1	Kit de Mantenimiento
		G95001000	Celda de Oxígeno
		G00435000	Sensor de Flujo

Actividad realizada

Se realiza Calibración de Sensor de Flujo inspiratorio y espiratorio.
Se cambia celda y se realiza calibración de FiO2.
Se calibra PEEP y se revisa funcionalidad.

Se revisa estado general del equipo y se corrobora función del Sistema electrónico, Sistema neumático y Sistema mecánico. Se efectúa Reset de Horas.

Se Realizan Pruebas de Funcionalidad conforme a la rutina de mantenimiento anexa.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Queda Operando al 100%. Equipo Funcionando al 100%.

Luis Pedro Casas Andrade

Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital



Contrato: 019GYRO19N1824-008-00

Código: F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución: H.G.Z. No 30 IMSS Iztacalco
Descripción del equipo: Ventilador Volumetrico
Lugar y Fecha: CDMX Iztacalco

Folio: 1833 C

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	65153	Inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Código	Descripción	Código	Descripción
H.G.Z. No 30		R502000A1	Kit Mantenimiento
121444200		69500 1000	Celda de Oxígeno
15 MAR 2024		600435000	Sensor de Flujo

Refacciones instaladas

Actividad realizada

Se realiza Cambio de sensor y Calibración de Sensores inspiratorio y espiratorio.
Se cambia celda y se realiza calibración de F. O₂.
Se calibra PEEP y se revisa funcionalidad.
Se revisa estado general del equipo, se cambia estado del sistema electrónico, sistema neumático y sistema mecánico. Se efectúa Reset de horas.
Se realizan Pruebas de funcionalidad conforme a la rutina del mantenimiento anexo.
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Queda operando al 100%. Equipo funcionando al 100%.

Luis Pedro Casas Andia de

Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital

Hospital o Institución: H.G.Z. No. 30 IMSS Iztacalco
Descripción del equipo: Ventilador Volumetrico
Lugar y Fecha: CDMX Iztacalco

Folio: 1832 C

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	65197	Inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Primer Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas

Código	Descripción	Código	Descripción
		R502000A1	Kit Mantenimiento
		695001000	Celda de O ₂

Refacciones instaladas

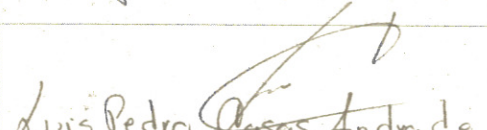
Actividad realizada

Mantenimiento Preventivo realizado. Efectuando calibración de Sensores de Flujo, Calibración y cambio de celda para el sensor de F.O₂, Reset de horas por mantenimiento, verificación de estado físico, verificación de sistema electrónico y verificación de sistema neumático.

Se realizan pruebas de funcionalidad con instrumentos certificados y conforme a la rutina de mantenimiento anexa.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, quedando operando al 100%.

Equipo funcionando al 100%

 Luis Pedro Casas Andrade	 Responsable de área usuaria	 Responsable del Hospital
--	---	---