

ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1 Durango, Durango.	
Área:		Equipo: Ventilador mecánico Marca: Aconmed	
Servicio Solicitado:		Modelo: VG70	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		No. Serie: X72530675	
		Falla Reportada:	
Descripción del Servicio: Equipo ocupado con paciente crítico.			
☐ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES ☐ FUNCIONALIDAD INICIAL ☐ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS ☐ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☐ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS ☐ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES ☐ AJUSTES Y CALIBRACIÓN ☐ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones: Requiere Si ☐ No ☐ Instalación Si ☐ No ☐		Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad: No. Parte:
Status del Servicio ☐ Terminado ☐ No Terminado ☒ Reprogramado			
Status del Equipo ☒ Funcionando ☐ Funcionando parcialmente ☐ Sin funcionar			
Observaciones:			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lucila Santandrea	04 - Mayo - 2021	04 - Mayo - 2021	



IMSS
H.G.Z. M.F. No 1
JEFATURA DE
CONSERVACION



Ing. Omar Gurrola Galván
Hospital General de Zona No. 1
Jefe Conservación de Unidad
Mat 99103682

Firma y sello de aceptación por parte del hospital



IMSS

H.G.Z. M.F. No 1
JEFATURA DE
CONSERVACION



ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1	
Area:		Durango, Durango.	
Servicio Solicitado:		Equipo: Ventilador Mecánico.	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Marca: Aconmed	
		Modelo: VG70	
		No. Serie: XZZS30562	
		Falla Reportada:	
Descripción del Servicio: Se recibe equipo en excelentes condiciones, filtros en buen estado. Se realiza calibración de válvula inspiratoria, sensor de flujo y sensor de oxígeno. Se realiza ciclado con batería y prueba de funciones de acceso directo y alarmas, se realiza barrido de FiO2.			
☒ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☒ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS	
☒ FUNCIONALIDAD INICIAL		☒ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☒ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☒ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☒			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☒ Terminado		☐ No Terminado	
		☐ Reprogramado	
Status del Equipo			
☒ Funcionando		☐ Funcionando parcialmente	
		☐ Sin funcionar	
Observaciones:			
1107 hrs de funcionamiento. Kit de mantenimiento en resguardo en el hospital.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lucila Contreras S.	03 - Mayo - 2021	03 - Mayo - 2021	

TTR. Jorge Calderón Blanco

8331251 JCB

Inhaloterapeuta

Fecha 3/05/21

Jc Blanco



Ing. Omar Gurrola Galván

Hospital General de Zona No. 1

Jefe Conservación de Unidad

Mat. 99103682

Firma y sello de aceptación por parte del hospital



IMSS
H.G.Z. M.F. No 1
JEFATURA DE
CONSERVACION

ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Nombre:		Hospital General de Zona 1	
Área:		Durango, Durango	
Servicio Solicitado:		Equipo: Ventilador Mecánico.	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Marca: Aeonmed	
		Modelo: VG70	
		No. Serie: XZZS29954	
		Falla Reportada:	
Descripción del Servicio: Se recibe equipo en buenas condiciones, falta filtro de polvo. Se realiza calibración de válvula inspiratoria, sensor de flujo y sensor de oxígeno. Se realiza ciclado con batería de respaldo y prueba de funciones de acceso directo, alarmas y barrido de FiO2.			
☒ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☒ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS	
☒ FUNCIONALIDAD INICIAL		☒ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☒ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☒ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☒			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☒ Terminado		☐ No Terminado	
		☐ Reprogramado	
Status del Equipo			
☒ Funcionando		☐ Funcionando parcialmente	
		☐ Sin funcionar	
Observaciones:			
992 hrs de funcionamiento.			
Kit de mantenimiento en resguardo en el hospital.			
- Se instala una filtro para polvo.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lucila Santander S.	03 - Mayo - 2021	03 - Mayo - 2021	

TTR. Jorge Calderón Blanco
8331251 3/05/21
Inhaloterapeuta
Fecha *[Firma]*
Jo Blanco

Firma y sello de aceptación por parte del hospital



Ing. Omar Gurrola Galván
Hospital General de Zona No. 1
Jefe Conservación de Unidad
Mat. 99103682



IMSS

H.G.Z. M.F. No 1
JEFATURA DE
CONSERVACION



ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1 Durango, Durango.	
Area:		Equipo: Ventilador Mecánico.	
Servicio Solicitado:		Marca: Aconmed	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Modelo: VG70	
		No. Serie: XZZS30356	
		Falla Reportada: —	
Descripción del Servicio: Se recibe equipo en buenas condiciones, falta filtro de polvo. Se realiza calibración de válvula inspiratoria, sensor de flujo y sensor de oxígeno. Se realiza ciclado con batería en carga y prueba de funciones de acceso directo, alarmas y barrido de FIO ₂ .			
☒ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☒ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS	
☒ FUNCIONALIDAD INICIAL		☒ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☒ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☒ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☒			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☒ Terminado ☐ No Terminado ☐ Reprogramado			
Status del Equipo			
☒ Funcionando ☐ Funcionando parcialmente ☐ Sin funcionar			
Observaciones: 2756 hrs de funcionamiento. Kit de mantenimiento en resguardo en el hospital. - Se instala filtro para polvo.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lucila Santander S.	03 - Mayo - 2021	03 - Mayo - 2021	

TTR. Jorge Calderón Blanco

8331251 *NR*

Inhaloterapeuta

Fecha 3/05/21

Jc Blanco



Ing. Omar Gurroia Galván

Hospital General de Zona No. 1

Jefe Conservación de Unidad

Mat. 99103682

Firma y sello de aceptación por parte del hospital



ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1	
Área:		IMSS, Durango	
Servicio Solicitado:		Equipo: Ventilador Mecánico	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Marca: Aconmed	
		Modelo: VG70	
		No. Serie: XZZS30439	
		Falla Reportada: _____	
Descripción del Servicio: Equipo ocupado con paciente crítico.			
☐ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☐ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS	
☐ FUNCIONALIDAD INICIAL		☐ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☐ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☐ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☐ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☐ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☐			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☐ Terminado		☐ No Terminado	
		☒ Reprogramado	
Status del Equipo			
☒ Funcionando		☐ Funcionando parcialmente	
		☐ Sin funcionar	
Observaciones: Equipo en unidad COVID-19, Tapias, Durango			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Leticia Santander S.	04-Mayo-2021	04-Mayo-2021	


Juanita Sanjurjo

Dr. Enrique Villanueva Guzman
JEFE TURNO DE MEDICINA INTERNA
H.G.Z. 14 F. No. 1



Ing. Omar Gurrola Galvan
Hospital General de Zona No. 1
Jefe Conservación de Unidad
Mat. 99103682

Firma y sello de aceptación por parte del hospital

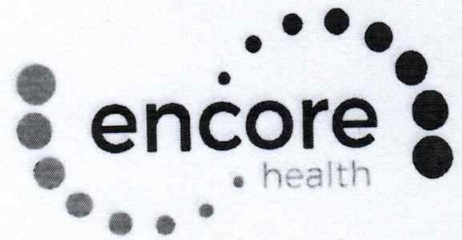

ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1 -	
Área:		IMSS, Durango	
Servicio Solicitado:		Equipo: Ventilador Mecánico	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Marca: V conmed	
		Modelo: V970	
		No. Serie: X22530126	
		Falla Reportada: _____	
Descripción del Servicio: Equipo ocupado con paciente crítico.			
☐ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☐ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS	
☐ FUNCIONALIDAD INICIAL		☐ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☐ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☐ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☐ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☐ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☐			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☐ Terminado		☐ No Terminado	
		☒ Reprogramado	
Status del Equipo			
☒ Funcionando		☐ Funcionando parcialmente	
		☐ Sin funcionar	
Observaciones: Equipo en unidad COVID-19 Tapias, Durango.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lucila Santibañez	04 - Mayo - 2021	04 - Mayo - 2021	

Ing. Nalleli Lucila Santibañez

Dr. Enrique Villanueva Guzmán

JEFATURA DE MEDICINA INTERNA

H.G.Z. M.F. No. 1

Firma y sello de aceptación por parte del hospital



Ing. Omar Gurrola Galván

Hospital General de Zona No. 1

IMSS - Unidad de Conservación de Unidad

Mat. 99103582



ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1	
Área:		IMSS Durango	
Servicio Solicitado:		Equipo: Ventilador Mecánico	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Marca: Aconmed	
		Modelo: VG70	
		No. Serie: XZZ530508	
		Falla Reportada: _____	
Descripción del Servicio: Se recibe equipo en buenas condiciones, se realiza limpieza de filtro de polvo. Se realiza calibración de válvula inspiratoria, sensor de flujo y sensor de oxígeno, falla sensor de oxígeno y cancela calibración. Se realiza ciclado con batería de respaldo, prueba de funciones de alarma fuerte y alarmas.			
☒ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☒ REVISIÓN DE CONDICIONES MECÁNICAS	
☒ FUNCIONALIDAD INICIAL		☒ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☒ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☒ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☒ No ☐	Sensor de oxígeno de 3 pines.		
Instalación Si ☐ No ☒			
Status del Servicio			
☒ Terminado ☐ No Terminado ☐ Reprogramado			
Status del Equipo			
☒ Funcionando ☒ Funcionando parcialmente ☐ Sin funcionar			
Observaciones:			
Menos de 5000 hrs. de funcionamiento. Equipo en unidad COVID-19 Tapias, Durango.			
Kit de mantenimiento en resguardo en HGEZ 1, IMSS.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lucila Santander S.	03-Mayo-2021	03-Mayo-2021	

Juana Santander




H.G.Z. NO. 1

IMPRESA DE MEDICINA



Ing. Omar Gurrola Galván
Hospital General de Zona No. 1
Jefe Conservación de Unidad
Mat. 99103582

Firma y sello de aceptación por parte del Hospital

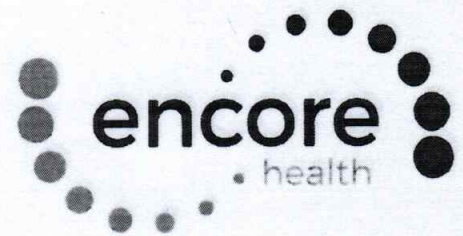

ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Hospital General de Zona 1 IMSS, Durango			
Nombre:	Equipo: Ventilador Mecánico		
Área:	Marca: Aconmed		
Servicio Solicitado:	Modelo: VG70		
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐	No. Serie: X2ES30374		
Falla Reportada:			
Descripción del Servicio: Se recibe equipo en buenas condiciones, se realiza limpieza de filtro de polvo. Se realiza calibración de la válvula inspiratoria, sensor de flujo y sensor de oxígeno. Se realiza ciclado con batería de respaldo, prueba de funciones de acceso directo y alarmas, se realiza barrido de FiO2.			
☒ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES	☒ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS		
☐ FUNCIONALIDAD INICIAL	☒ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES		
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS	☒ AJUSTES Y CALIBRACIÓN		
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS	☒ LIMPIEZA GENERAL		
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☒			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☒ Terminado ☐ No Terminado ☐ Reprogramado			
Status del Equipo			
☒ Funcionando ☐ Funcionando parcialmente ☐ Sin funcionar			
Observaciones: Menos de 5000 hrs de funcionamiento. Equipo en unidad COVID-19 Tapias, Durango. Kit de mantenimiento en resguardo en HGZ1 IMSS.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Ing. Nalleli Lirio Santander S.	03 - Mayo - 2021	03 - Mayo - 2021	

[Firma de Nalleli Lirio Santander S.]

Dr. Enrique Villanueva Guzman

JEFEATURA DE MEDICINA INTERNA
H.C.Z. M.F. No. 1
Mat. 98202216



Ing. Omar Gurrola Galván

Hospital General de Zona No. 1

Jefe Conservación de Unidad

Mat. 99103562

Firma y sello de aceptación por parte del hospital



ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Nombre:		Hospital General de Zona 1	
Área:		LMSS, Durango.	
Servicio Solicitado:		Equipo: Ventilador Mecánico	
Preventivo ☒ Correctivo ☐ Instalación ☐		Marca: Acornmed	
		Modelo: VG70	
		No. Serie: XZES30604	
		Falla Reportada: _____	
Descripción del Servicio: Se recibe equipo en buenas condiciones, se realiza limpieza de filtro para polvo. Se realiza calibración de la válvula inspiratoria, sensor de flujo y sensor de oxígeno. Se realiza ciclado con batería de respaldo, prueba de funciones de acceso directo, alarmas y barrido de FiO2.			
☒ CONDICIONES FÍSICAS INICIALES		☒ REVISIÓN DE CONDICIONES MECANICAS	
☒ FUNCIONALIDAD INICIAL		☒ REVISIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELÉCTRICAS		☒ AJUSTES Y CALIBRACIÓN	
☒ REVISIÓN DE CONDICIONES ELECTRÓNICAS		☒ LIMPIEZA GENERAL	
Refacciones:	Descripción de la (s) refacción(es):	Cantidad:	No. Parte:
Requiere Si ☐ No ☒			
Instalación Si ☐ No ☐			
Status del Servicio			
☒ Terminado ☐ No Terminado ☐ Reprogramado			
Status del Equipo			
☒ Funcionando ☐ Funcionando parcialmente ☐ Sin funcionar			
Observaciones:			
342 hrs de funcionamiento. Equipo en unidad COVID-19 Tapias, Durango. Kit de mantenimiento en resguardo en HGZ 1, IMSS.			
Ingeniero de Servicio:	Fecha de Inicio de Servicio	Fecha de Término de Servicio	
Luz Nalleli Lucila Santander S.	03 - Mayo - 2021	03 - Mayo - 2021	

Luz Nalleli Lucila Santander S.

Dr. Enrique Villanueva Guzmán
JEFATURA DE MEDICINA INTERNA
H.G. ZONA 1, IMSS
Mat. 99103682



Ing. Omar Gurrola Galván
Hospital General de Zona No. 1
Jefe Conservación de Unidad
Mat. 99103682

Firma y sello de aceptación por parte del hospital IMSS