



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3082

CONTRATO: 019642019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 58

DIRECCIÓN: Blvd Manuel Ávila Camacho Esq Tepoztlán

FECHA: 22/marzo/2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Diarc

MODELO:

Diarc bron4000

SERIE:

66996

INVENTARIO:

312

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A1	Kit de mantenimiento b4000LS?		
PSR11917J7	Sensor de Oxígeno		
E96512000	2 baterías 12V 1.3Ah		
G00438000	Sensor de flujo respiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba Manual Service Diarc

Aspecho físico OK ✓ Bueno

Bloque respiratorio OK ✓

Manguera Air O₂ OK ✓

Cable oxígeno OK ✓

Calibraciones

Celda de O₂ (62 mV) OK ✓

Sensores de flujo respiratorio OK ✓

Prueba de fugas 1ml 1min OK ✓

Voltaje de baterías 13.6 Ah OK ✓

Horas totales 3534h 56m 43s OK ✓

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

22 MAR 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

16 01 01 200 217

HOSPITAL GENERAL DE ZONA
NO. 58 GOBIERNOEl equipo queda operativamente apto al 100%
Equipo funcionando al 100%.

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian Martín
Hernández Alarcó

NOMBRE:

Ing. Daniel Benito Bautista

NOMBRE:

Ing. Daniel Benito Bautista

FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

IMSS Mat. 99165473

RFC INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

66 946

9.5 Tabla procedimiento de prueba

Número de Serie:

Ref.	Verificación	Valores medidos	Resultado	Notas
1	Aspecto estético	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
2	Presencia marcas	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
3	Versión software	Rel. 1.8.6	☒ Pos. ☐ Neg.	
4	AUTO-PRUEBA	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma acústica	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
5	Pérdida circuito paciente (PRUEBA)	Pérdida 1	☒ Pos. ☐ Neg.	
6	Calibración sensor O2 (PRUEBA)	62 mV	☒ Pos. ☐ Neg.	
7	Verificación sensor O2 (99%)	99 %	☒ Pos. ☐ Neg.	
8	Presión 10 cmH2O configurada	Med. 10	☒ Pos. ☐ Neg.	
	20 cmH2O	Med. 20	☒ Pos. ☐ Neg.	
9	Calibración sensor de flujo	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
	Modo operativo VC/VAC	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
10	Verificación DISPARADOR flujo	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR presión	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
11	Verificación frecuencias	Config. 12 bpm Mis. 12	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 40 bpm Mis. 40		
		Config. 70 bpm Mis. 70		
	Alarma baja/alta frecuencia	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
12	Pérdida circuito baja presión	Config. 21% OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 100 %	☒ Pos. ☐ Neg.	
13	Alarma alimentación eléctrica	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
14	Alarma alimentaciones gas	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
15	Función INSP HOLD	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
16	Función EXP HOLD	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	
17	Nebulizador (6l/min)	Mis. 6	☒ Pos. ☐ Neg.	
18	Función 100% O2	OK	☒ Pos. ☐ Neg.	

HOSPITIUM
SOLUTIONS

RFC: HSO190507A66

Manual de Servicio, DU5065300 / rev. - 02.09.2013

Ing. Daniel Bautista
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 99165473

9-11

Número de Serie:

19	FiO2	Configurada 21	AdF	Siaretron	☒ Pos.	☐ Neg.
	%	Configurada 30	21	21 %		
		Configurada 60	30	30 %		
		Configurada 80	60	60 %		
		Configurada 99	80	80 %		
				100 %		
Alarma baja/alta FiO2		OK		☒ Pos.	☐ Neg.	
20	Modo operativo VC/VAC					
	Vti (Ti = 0)	AdF 21%	AdF 100%	Siaretron	☒ Pos.	☐ Neg.
	Config 50 ml (30)	NA	NA	NA		
	Config. 100 ml (20)	99	100	100 ml		
	Config. 250 ml (20)	250	250	250 ml		
	Config. 500 ml (15)	500	500	500 ml		
	Config. 750 ml (15)	749	750	750 ml		
	Config. 1000 ml (12)	981	990	1000 ml		
Alarma bajo/alto Vte		OK		☐ Pos.	☐ Neg.	
Alarma bajo/alto VM		OK		☒ Pos.	☐ Neg.	
21	Alarma baja/alta presión		Retardo	L seg.	☒ Pos.	☐ Neg.
22	Comprobación relación I:E		OK		☒ Pos.	☐ Neg.
23	Función SIGH		OK		☒ Pos.	☐ Neg.
24	PEEP	0	AdF	Siaretron	☒ Pos.	☐ Neg.
	cmH2O	5	0	OFF		
		10	5	5 cm H2O		
		15	10	10 cm H2O		
		20	15	15 cm H2O		
			20	20		
Alarma baja/alta PEEP		OK		☒ Pos.	☐ Neg.	



66996

Número de Serie:

25	VCMAC BABY Config. 5 ml (50bpm) +/-1 Config. 10 ml (50bpm) +/-1 Config. 20 ml (50bpm) +/-2	AdF 5 10 20	Siaretron 5 ml 10 ml 20 ml	☒ Pos. ☐ Neg.
26	Modo operativo APCV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
27	Modo operativo APCV-TV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
28	Modo operativo PSV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
	Apnea Back Up	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
	Verificación parámetros de BK	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
29	Modo operativo PSV-TV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
	Apnea Back Up	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
	Verificación parámetros de BK	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
30	Función MAN	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
31	Modo operativo V-SIMV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
32	Modo operativo P-SIMV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
33	Modo operativo CPAP	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
34	Modo operativo APRV	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
35	Configuración parámetros por defecto	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
36	Sensor gas	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
	Alarma EtCO2	NO APLICA		☒ Pos. ☐ Neg.
37	Parámetros respiradores medidos	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
38	Parámetros respiradores adicionales	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
39	GRÁFICOS - BUCLES	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
40	TENDENCIAS - EVENTOS	OK		☒ Pos. ☐ Neg.
41	IDIOMA configurado	ESPAÑOL		☒ Pos. ☐ Neg.
42	Hoja prueba test eléctrico	NO APLICA		☒ Pos. ☐ Neg.
43	Horas de funcionamiento	3534h 56m 43s		

HOSPITIUM
SOLUTIONS

Manual de Servicio, D06065300 / rev. - 02.09.2013

Ing. Daniel Emilio Bautista
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 99165473

	REPORTE FOTOGRÁFICO		FOLIO ODS 3082

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 58


CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Siaretron 4000	SERIE: 66996	INVENTARIO: SI
--------------	------------------------	--------------	----------------


ANTES



DURANTE

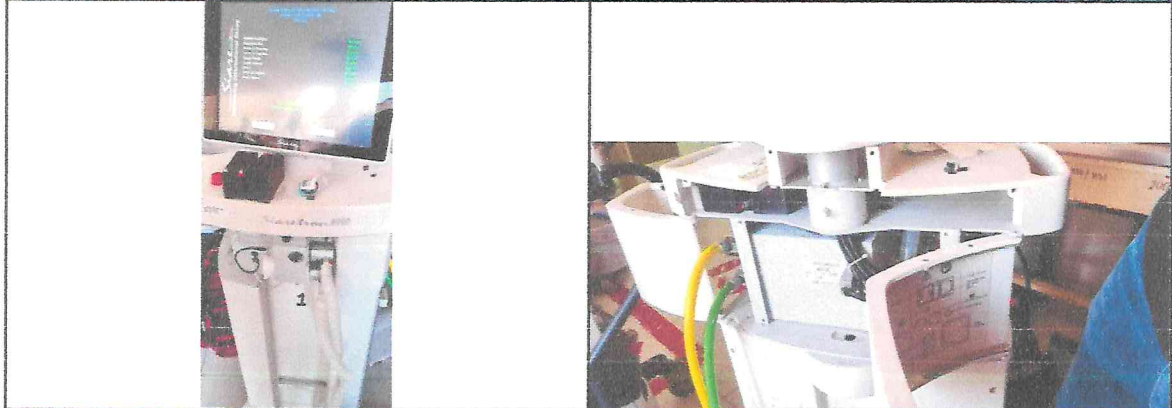

DESPUÉS

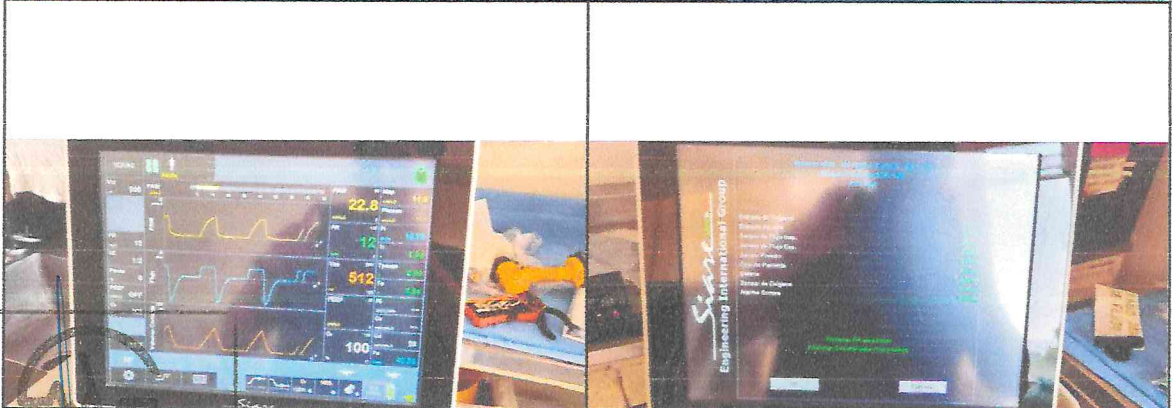



BITACORA

FOLIO

0381

CONTRATO: 019GYR019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 58

DIRECCIÓN: Blvd Manuel Avila Camacho Esq Tepoztlán

FECHA: 22/marzo/2024

FOLIO ODS: 3082

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Sarcodon 1000

SERIE:

66996

INVENTARIO:

51F

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS0200041	Kit mantenimiento 4000/5"		
PSR1917J7	Sensor de Oxígeno		
EQ6512000	2 baterías 12V 1.34h		
G00435000	Sensor de flujo inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba Manual Service Siarc

Aspecto físico OK✓

Blaque expiratorio OK✓

Manguera Aire O₂ OK✓

Cable oxígeno OK✓

Calibraciones

Celda de O₂ 62mV OK✓

El equipo queda operativamente apto al 100%.

Sensor de flujo respiratorio OK✓

Prueba de fugas 1ml/min OK✓

Equipo funcionando al 100%.

Volumen baterías 13.6 Ah OK✓

Horas totales 3534h 56m 43s OK✓

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

16 01 01 200 217

HOSPITAL GENERAL DE ZONA
NO. 58 GOBIERNO

22 MAR 2024

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martin

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

FIRMA:

MATRICULA:
CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:
CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA