
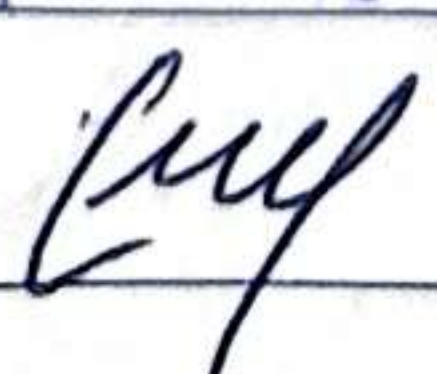


		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3380	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67					
DIRECCIÓN: col. Apodaca Centro, 66600, Apodaca, Nuevo Leon					
FECHA: 13 de Mayo del 2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siore		MODELO: Sioretron 4000		SERIE: 65132	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico					
Ubicacion: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000A1	Kit de mantenimiento				
E96512000	2 Baterias 12V				
PSR1191F37	Celda de O2				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventiva de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)					
Aspecto Fisico: OK					
Bloque Espiratorio: OK					
Manueras Aire/O2: OK					
Cable AC: OK					
Cable Celda O2: OK					
Calibraciones:				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Celda de O2: 56 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 4 ml/min OK					
Baterias: OK					
Horas totales: 5250h 50m 40s				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO	
Equipo operativamente apto para utilizarse					
Equipo funcionando al 100%				HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 67	
Terminacion de Servicio: 3 de Mayo del 2024					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael		NOMBRE: Dr. Dionisio Israel Morales Marañón		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
FIRMA: 		FIRMA: 		ING. ISRAEL NERNANDEZ LOMAS	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:		SUB. JEFE DE CONSERVACIÓN	
CARGO:		CARGO:		MATRÍCULA:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		BITACORA		FOLIO 0682	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67					
DIRECCIÓN: Col. Apodaca Centro, 66600, Apodaca, Nuevo Leon					
FECHA: 3 de Mayo del 2024				FOLIO ODS: 3380	
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Soretron 4000		SERIE: 65132	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico					
Ubicación: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A1	Kit de mantenimiento				
EA6512000	2 Baterias 12 V				
PSRM191757	Celda de O2				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla					
Procedimiento de Prueba (Service Manuel Siare)					
Aspecto Fisico: OK		Bloque Espiratorio: OK			
Mangueras Aire/O2: OK		Cable AC: OK			
Cable Celda O2: OK					
Calibraciones:					
Celda de O2: 56mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 4 ml/min OK					
Baterias: OK					
Horas totales: 5250h 50m 40s					
Terminación de servicio: 3 de Mayo del 2024					
Equipo operativamente apto para utilizarse		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Equipo funcionando al 100%					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Lacheta Arias		NOMBRE: Dr. Dionisio Israel Morales Marell		NOMBRE: ING. ISRAEL HERNANDEZ COMAS	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	
MATRICULA: 97205126		MATRICULA: 97205126		MAT. 98205123	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

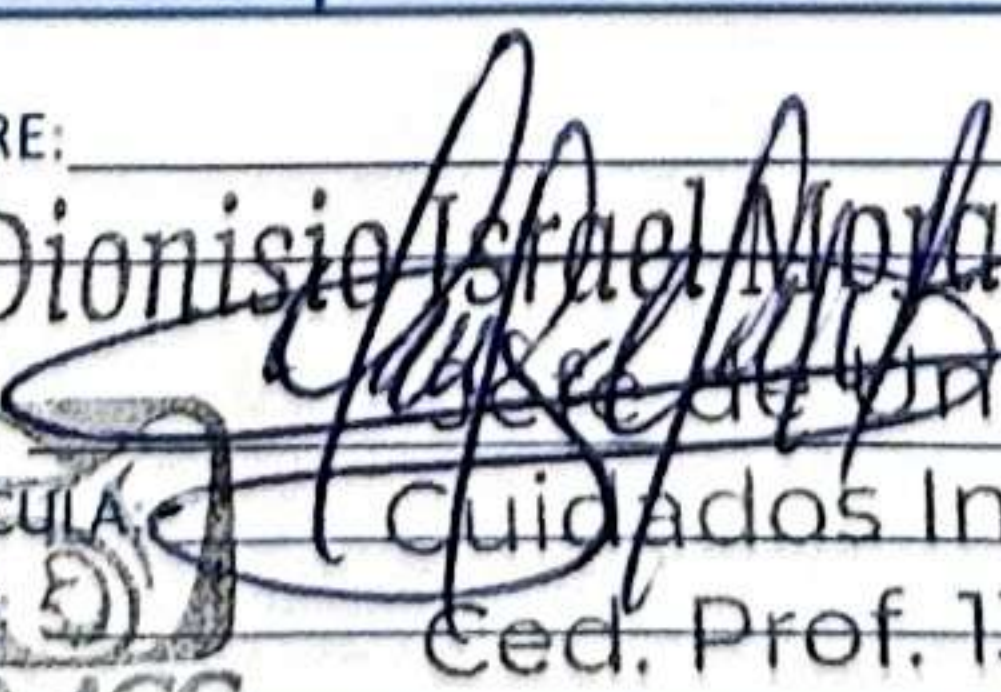

REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3380


CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: SIARE	MODELO: SIARETRON 4000	SERIE: 65132	INVENTARIO:
--------------	---------------------------	--------------	-------------


ANTES

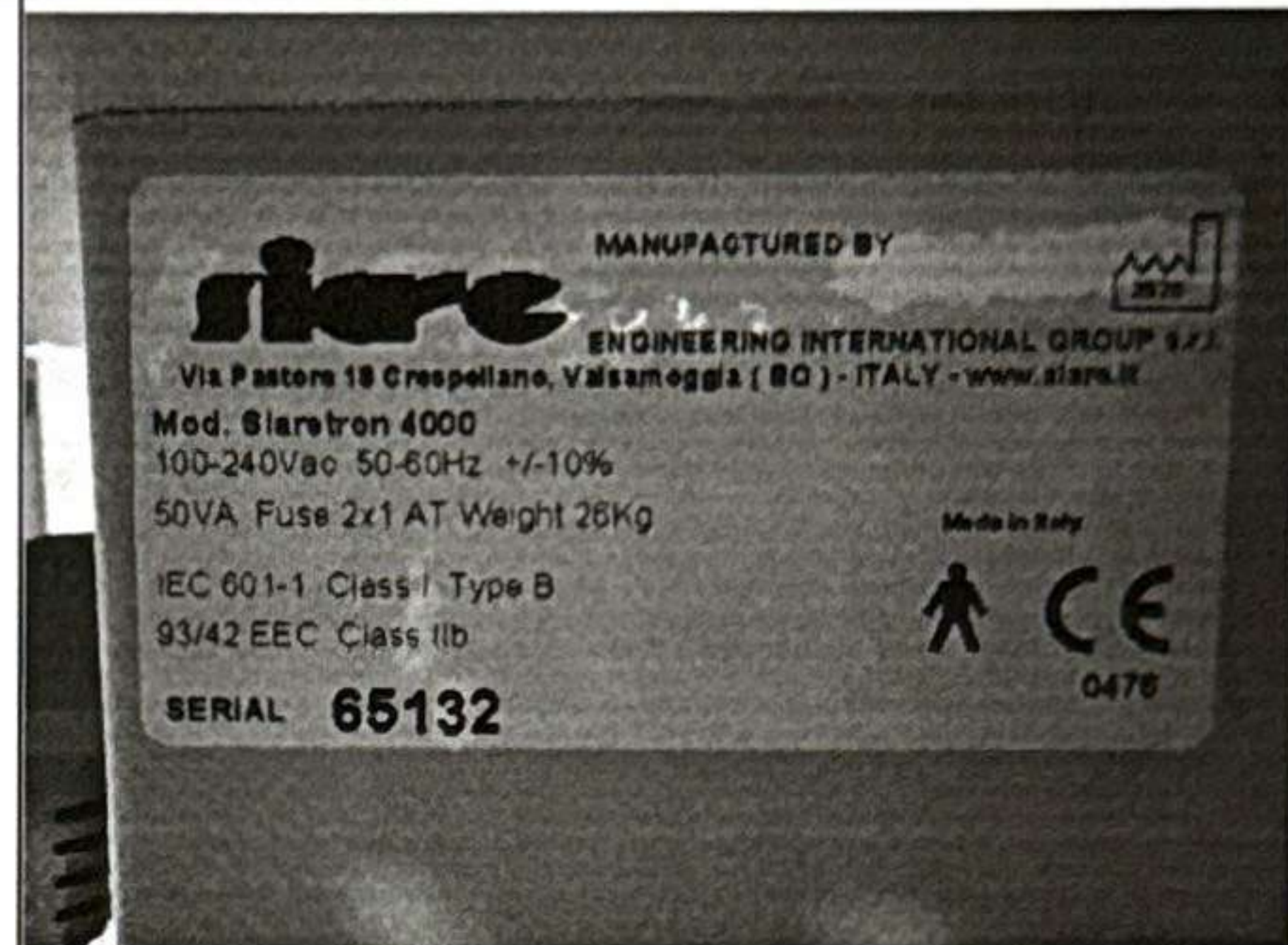

DURANTE



DESPUÉS

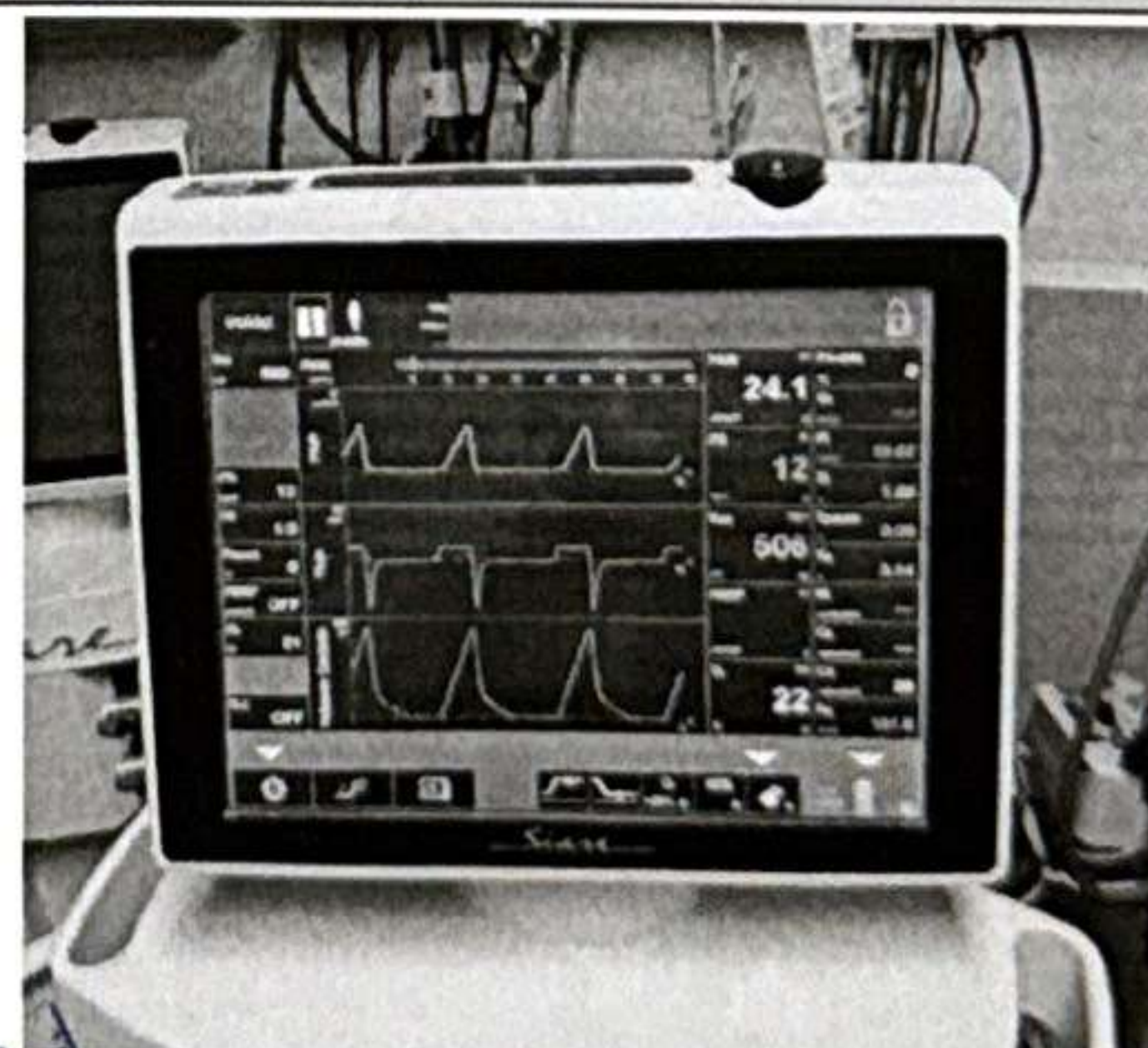

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



ING. ISRAEL HERNANDEZ DOMAS

SUB. JEFE DE CONSERVACION

MAT.98205723

Dr. Dionisio Israel Morales Marentes



Jefe Unidad de
Cuidados Intensivos

Ced. Prof. 13350253

Matrícula 97205126

9.5 Tabla procedimiento de prueba

Número de Serie: **65132**

Ref.	Verificación	Valores medidos	Resultado	Notas
1	Aspecto estético		☒ Pos. ☐ Neg.	
2	Presencia marcas		☒ Pos. ☐ Neg.	
3	Versión software	Rel. <u>1.8.6</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
4	AUTO-PRUEBA		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma acústica		☒ Pos. ☐ Neg.	
5	Pérdida circuito paciente (PRUEBA)	Pérdida <u>4 ml/min</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
6	Calibración sensor O2 (PRUEBA)	<u>56</u> mV	☒ Pos. ☐ Neg.	
7	Verificación sensor O2 (99%)	<u>99</u> %	☒ Pos. ☐ Neg.	
8	Presión 10 cmH2O configurada	Med. <u>10</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
	20 cmH2O	Med. <u>20</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
9	Calibración sensor de flujo		☒ Pos. ☐ Neg.	
10	Modo operativo VC/VAC		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR flujo		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR presión		☒ Pos. ☐ Neg.	
11	Verificación frecuencias	Config. 12 bpm Mis. <u>12</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 40 bpm Mis. <u>40</u>		
		Config. 70 bpm Mis. <u>70</u>		
	Alarma baja/alta frecuencia		☒ Pos. ☐ Neg.	
12	Pérdida circuito baja presión	Config. 21%	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 100 %	☒ Pos. ☐ Neg.	
13	Alarma alimentación eléctrica		☒ Pos. ☐ Neg.	
14	Alarma alimentaciones gas		☒ Pos. ☐ Neg.	
15	Función INSP HOLD		☒ Pos. ☐ Neg.	
16	Función EXP HOLD		☒ Pos. ☐ Neg.	
17	Nebulizador (6l/min)	Mis. <u>6 l/min</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
18	Función 100% O2		☒ Pos. ☐ Neg.	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



ING. ISRAEL HERNANDEZ DOMAS
SUB. JEFE DE CONSERVACIÓN
MAT.98205726

Manual de Servicio, DU5065300 / rev. 02.09.2013

Dr. Dionisio Israel Morales Magrentes
Jefe de Unidad de
Unidades Intensivas
Cred. Prof. 13350253
MAT.98205126

Número de Serie:

19	FiO2 %	Configurada 21	AdF <u>21</u>	Siaretron <u>21 %</u>	☒ Pos. ☐ Neg.
		Configurada 30	<u>30</u>	<u>30 %</u>	
		Configurada 60	<u>60</u>	<u>60 %</u>	
		Configurada 80	<u>80</u>	<u>80 %</u>	
		Configurada 99	<u>100</u>	<u>100 %</u>	
		Alarma baja/alta FiO2			
20	Modo operativo VCV/VAC				
	Vti (Ti = 0)	AdF 21%	AdF 100%	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.
	Config 50 ml (30)	NA	NA	NA	
	Config. 100 ml (20)	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100 ml</u>	
	Config. 250 ml (20)	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250 ml</u>	
	Config. 500 ml (15)	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500 ml</u>	
	Config. 750 ml (15)	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750 ml</u>	
	Config. 1000 ml (12)	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000 ml</u>	
Alarma bajo/alto Vte				☒ Pos. ☐ Neg.	
Alarma bajo/alto VM				☒ Pos. ☐ Neg.	
21	Alarma baja/alta presión		Retardo <u>1</u> seg.		☒ Pos. ☐ Neg.
22	Comprobación relación I:E				☒ Pos. ☐ Neg.
23	Función SIGH				☒ Pos. ☐ Neg.
24	PEEP cmH2O	0	AdF <u>0</u>	Siaretron <u>OFF</u>	☒ Pos. ☐ Neg.
		5	<u>5</u>	<u>5 cm H2O</u>	
		10	<u>10</u>	<u>10 cm H2O</u>	
		15	<u>15</u>	<u>15 cm H2O</u>	
		20	<u>20</u>	<u>20 cm H2O</u>	
		Alarma baja/alta PEEP			

Número de Serie:

25	VC/VAC BABY Config. 5 ml (50bpm) +/-1 Config. 10 ml (50bpm) +/-1 Config. 20 ml (50bpm) +/-2	AdF 5 10 20	Siaretron 5 ml 10 ml 20 ml	☒ Pos. ☐ Neg.	
26	Modo operativo APCV			☒ Pos. ☐ Neg.	
27	Modo operativo APCV-TV			☒ Pos. ☐ Neg.	
28	Modo operativo PSV			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Apnea Back Up			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación parámetros de BK			☒ Pos. ☐ Neg.	
29	Modo operativo PSV-TV			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Apnea Back Up			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación parámetros de BK			☒ Pos. ☐ Neg.	
30	Función MAN			☒ Pos. ☐ Neg.	
31	Modo operativo V-SIMV			☒ Pos. ☐ Neg.	
32	Modo operativo P-SIMV			☒ Pos. ☐ Neg.	
33	Modo operativo CPAP			☒ Pos. ☐ Neg.	
34	Modo operativo APRV			☒ Pos. ☐ Neg.	
35	Configuración parámetros por defecto			☒ Pos. ☐ Neg.	
36	Sensor gas			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma EtCO2		NO APLICA	☐ Pos. ☐ Neg.	
37	Parámetros respiradores medidos			☒ Pos. ☐ Neg.	
38	Parámetros respiradores adicionales			☒ Pos. ☐ Neg.	
39	GRÁFICOS - BUCLES			☒ Pos. ☐ Neg.	
40	TENDENCIAS - EVENTOS			☒ Pos. ☐ Neg.	
41	IDIOMA configurado		ESPAÑOL	☒ Pos. ☐ Neg.	
42	Hoja prueba test eléctrico		NO APLICA	☐ Pos. ☐ Neg.	
43	Horas de funcionamiento				