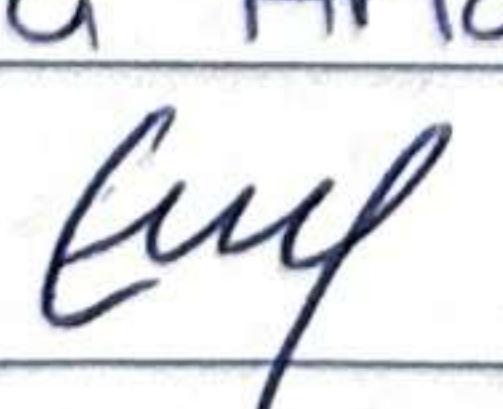
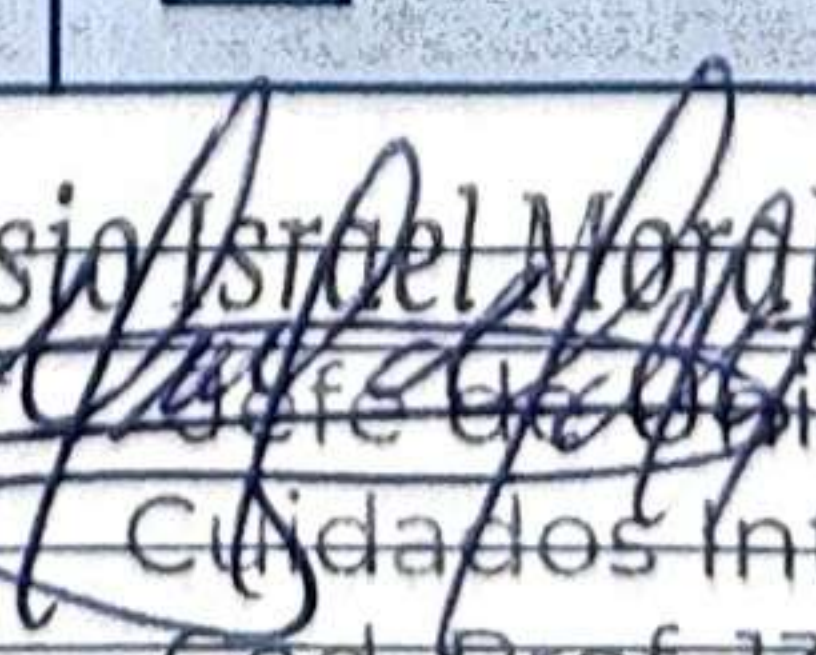
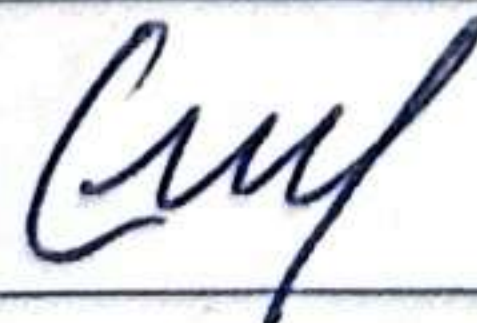
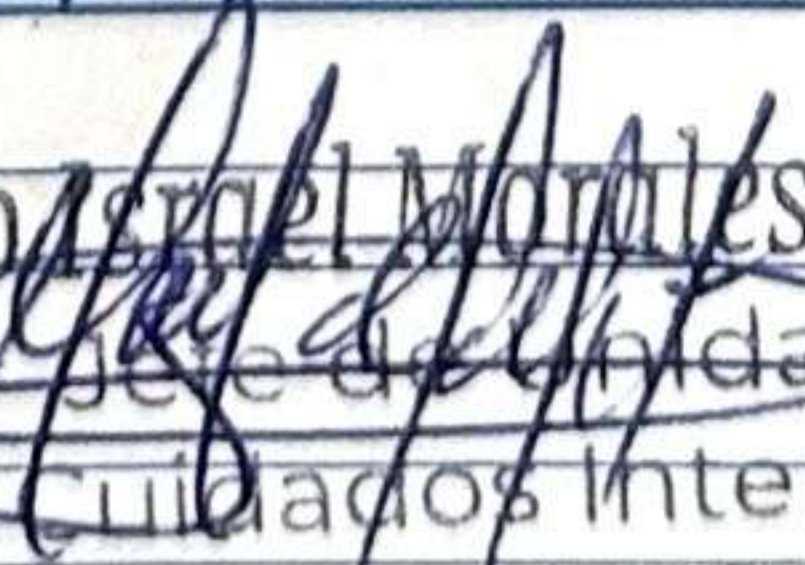
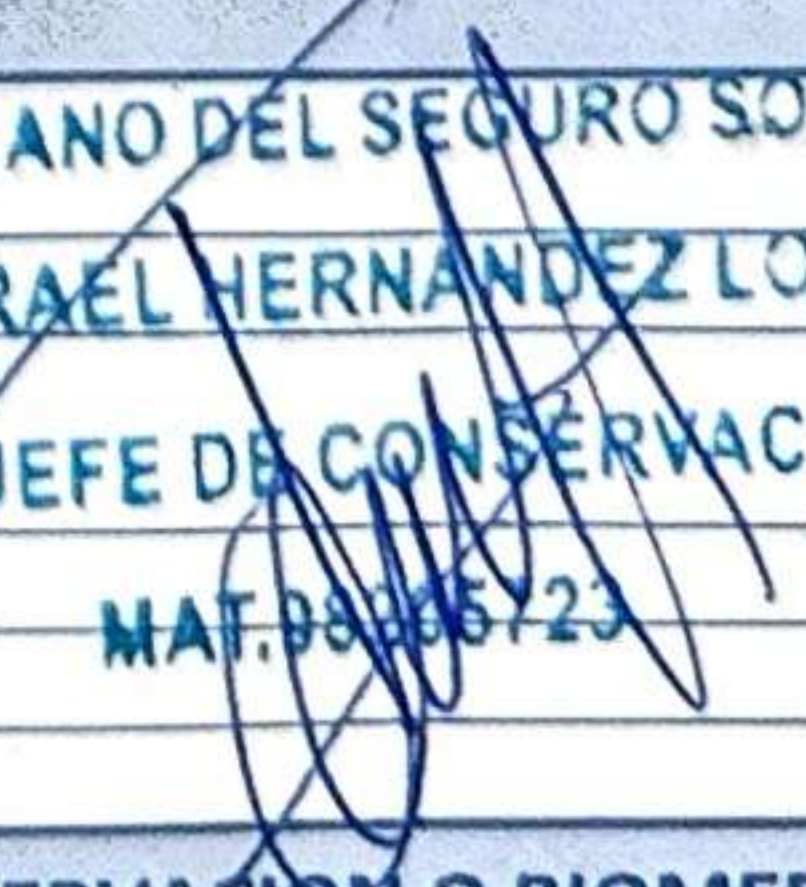


		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3381	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67					
DIRECCIÓN: col. Apodaca Centro, 66600, Apodaca, Nuevo Leon					
FECHA: 3 de Mayo del 2024					
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siore		MODELO: Sioretron 4000		SERIE: 65304	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico					
Ubicacion: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000M	Kit de mantenimiento				
E96512000	2 Baterias 12V				
PSR119175	Celda de O2				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla					
Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)					
Aspecto Fisico: OK					
Bloque Espiratorio: OK					
Mangueras Aire/O2: OK					
Cable AC: OK					
Cable Celda O2: OK					
Calibraciones:				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Celda de O2: 52 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 4ml/min OK					
Baterias: OK					
Horas totales: 12522h 8m 4s				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO	
Equipo operativamente apto para utilizarse				200105	
Equipo Funcionando al 100%				142902	
Terminacion de Servicio: 3 de Mayo del 2024				GENERAL DE ZONA No 67 CONSERVACION	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Arias		NOMBRE: Dr. Dionisio Israel Morales Martinez		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
FIRMA: 		FIRMA: 		ING. ISRAEL HERNANDEZ LOMAS	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:		SUB. JEFE DE CONSERVACION	
CARGO:		CARGO:		MAT. 98205126	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		BITACORA		FOLIO 0683	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67					
DIRECCIÓN: col. Apodaca Centro, 66600, Apodaca, Nuevo Leon					
FECHA: 13 de Mayo del 2024				FOLIO ODS: 3381	
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Soretron 4000		SERIE: 6530A	
				INVENTARIO:	
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumétrico					
Ubicación: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
RS02000A1	Kit de mantenimiento				
E96S12000	2 Baterías 12V				
PSR1917J7	Celda de O2				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: OK			Bloque Espiratorio: OK		
Mangueras Aire/O2: OK			Cable AC: OK		
Cable Celda O2: OK					
Calibraciones:					
Celda de O2: 52 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de fugas: 4 ml/min OK					
Baterías: OK					
Horas totales: 12522h 8m 4s					
Terminación de Servicio: 3 de Mayo del 2024					
Equipo operativamente apto para utilizarse.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
		200105 142902			
Equipo funcionando al 100%		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 67 CONSERVACIÓN			
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
				EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Gregorio Misoael Lucheta Arias		NOMBRE: Dr. Dionisio Israel Morales Maren		NOMBRE: ING. ISRAEL HERNANDEZ LOMAS	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	
MATRICULA: Cuy		MATRICULA: Ced. Prof. 13350253		MATRICULA: MAT. 98065723	
CARGO: INGENIERO DE SERVICIO		CARGO: USUARIO DEL EQUIPO		CARGO: JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

9.5 Tabla procedimiento de prueba

Número de Serie: **65304**

Ref.	Verificación	Valores medidos	Resultado	Notas
1	Aspecto estético		☒ Pos. ☐ Neg.	
2	Presencia marcas		☒ Pos. ☐ Neg.	
3	Versión software	Rel. <u>1.8.6</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
4	AUTO-PRUEBA		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma acústica		☒ Pos. ☐ Neg.	
5	Pérdida circuito paciente (PRUEBA)	Pérdida <u>4 ml/min</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
6	Calibración sensor O2 (PRUEBA)	<u>52</u> mV	☒ Pos. ☐ Neg.	
7	Verificación sensor O2 (99%)	<u>100</u> %	☒ Pos. ☐ Neg.	
8	Presión 10 cmH2O configurada	Med. <u>10</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
	20 cmH2O	Med. <u>20</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
9	Calibración sensor de flujo		☒ Pos. ☐ Neg.	
10	Modo operativo VC/VAC		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR flujo		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR presión		☒ Pos. ☐ Neg.	
11	Verificación frecuencias	Config. 12 bpm Mis. <u>12</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 40 bpm Mis. <u>40</u>		
		Config. 70 bpm Mis. <u>70</u>		
	Alarma baja/alta frecuencia		☒ Pos. ☐ Neg.	
12	Pérdida circuito baja presión	Config. 21%	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 100 %	☒ Pos. ☐ Neg.	
13	Alarma alimentación eléctrica		☒ Pos. ☐ Neg.	
14	Alarma alimentaciones gas		☒ Pos. ☐ Neg.	
15	Función INSP HOLD		☒ Pos. ☐ Neg.	
16	Función EXP HOLD		☒ Pos. ☐ Neg.	
17	Nebulizador (6l/min)	Mis. <u>6 l/min</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
18	Función 100% O2		☒ Pos. ☐ Neg.	

ING. ISRAEL HERNANDEZ DOMAS
SUB. JEFE DE CONSERVACION
MAT.98205713

Dr. Dionisio Israel Morales Marentes
Jefe de Unidad de
Cuidados Intensivos
Ced. Prof. 13350253
Matrícula 97205126

Número de Serie:

19	FiO2 %	Configurada 21	AdF <u>21</u>	Siaretron <u>21 %</u>	☒ Pos. ☐ Neg.
		Configurada 30	<u>30</u>	<u>30 %</u>	
		Configurada 60	<u>60</u>	<u>60 %</u>	
		Configurada 80	<u>80</u>	<u>80 %</u>	
		Configurada 99	<u>100</u>	<u>100 %</u>	
		Alarma baja/alta FiO2			
20	Modo operativo VC/VAC				
	Vti (Ti = 0)	AdF 21%	AdF 100%	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.
	Config. 50 ml (30)	NA	NA	NA	
	Config. 100 ml (20)	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100 ml</u>	
	Config. 250 ml (20)	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250 ml</u>	
	Config. 500 ml (15)	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500 ml</u>	
	Config. 750 ml (15)	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750 ml</u>	
	Config. 1000 ml (12)	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000 ml</u>	
Alarma bajo/alto Vte				☒ Pos. ☐ Neg.	
Alarma bajo/alto VM				☒ Pos. ☐ Neg.	
21	Alarma baja/alta presión	Retardo <u>1</u> seg.		☒ Pos. ☐ Neg.	
22	Comprobación relación I:E			☒ Pos. ☐ Neg.	
23	Función SIGH			☒ Pos. ☐ Neg.	
24	PEEP cmH2O	0	AdF <u>0</u>	Siaretron <u>OFF</u>	☒ Pos. ☐ Neg.
		5	<u>5</u>	<u>5 cm H2O</u>	
		10	<u>10</u>	<u>10 cm H2O</u>	
		15	<u>15</u>	<u>15 cm H2O</u>	
		20	<u>20</u>	<u>20 cm H2O</u>	
		Alarma baja/alta PEEP			

Número de Serie:

	VC/VAC BABY	AdF	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.	
25	Config. 5 ml (50bpm) +/-1 Config. 10 ml (50bpm) +/-1 Config. 20 ml (50bpm) +/-2	5 10 20	5 ml 10 ml 20 ml		
26	Modo operativo APCV			☒ Pos. ☐ Neg.	
27	Modo operativo APCV-TV			☒ Pos. ☐ Neg.	
28	Modo operativo PSV			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Apnea Back Up			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación parámetros de BK			☒ Pos. ☐ Neg.	
29	Modo operativo PSV-TV			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Apnea Back Up			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación parámetros de BK			☒ Pos. ☐ Neg.	
30	Función MAN			☒ Pos. ☐ Neg.	
31	Modo operativo V-SIMV			☒ Pos. ☐ Neg.	
32	Modo operativo P-SIMV			☒ Pos. ☐ Neg.	
33	Modo operativo CPAP			☒ Pos. ☐ Neg.	
34	Modo operativo APRV			☒ Pos. ☐ Neg.	
35	Configuración parámetros por defecto			☒ Pos. ☐ Neg.	
36	Sensor gas			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma EtCO2		NO APLICA	☐ Pos. ☐ Neg.	
37	Parámetros respiradores medidos			☒ Pos. ☐ Neg.	
38	Parámetros respiradores adicionales			☒ Pos. ☐ Neg.	
39	GRÁFICOS - BUCLES			☒ Pos. ☐ Neg.	
40	TENDENCIAS - EVENTOS			☒ Pos. ☐ Neg.	
41	IDIOMA configurado	ESPAÑOL		☒ Pos. ☐ Neg.	
42	Hoja prueba test eléctrico		NO APLICA	☐ Pos. ☐ Neg.	
43	Horas de funcionamiento				