



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3379

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General d- Zona No 67

DIRECCIÓN: Hospital Apodaca Central 66600 Apodaca, Nuevo Leon

FECHA:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siore MODELO: Siore-tron 4000 SERIE: 65268 INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1502000A1	h - de mantenimiento		
190512000	2 Baterias 12V		
25R1191737	Celda de O2		
600435000	Sensor de flujo		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Pruebas (Service Manual Siore)

Aspecto Fisico: Ok Bloque Espiratorio: Ok
Mangueras Aire/O2: Ok Cable AC: Ok
Cable Celda O2: Ok

Calibraciones:
Celda de O2: 51 mV OK
Sensores de flujo respiratorio: OK
Prueba de flujo: 4 ml/min OK
Baterias: OK

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

Horas totales: 7987h 33m 56s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

Equipo operativamente cdo para utilizarse.
Equipo funcionando al 100%

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Miguel Lacheta Arias
FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
MATRICULA:
CARGO:

NOMBRE:
FIRMA:
MATRICULA:
CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

0681

CONTRATO: 019GYR014N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67

DIRECCIÓN: Cal Apalaco Centro, 66600, Apalaco Nuevo Leon

FECHA:

FOLIO ODS:

5379

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siore

MODELO:

Sioretron 4000

SERIE:

65268

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y ARRANQUE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kit de mantenimiento		
E96512001	2 Baterias 12V		
PSR1111735	Celda de O2		
G00435000	Sensor de flujo		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Prerreamiento de Prueba (Service Manual Siore)

Aspecto Fisico: OK
Mangueras Aire/O2: OK
Cable Celda O2: OK

Bloque Espiratorio: OK
Cable AC: OK

Calibraciones:

Celda de O2: 5.1 mV OK
Sensores de flujo respiratorio: OK
Prueba de flujos: 4 ml/min OK
Baterias: OK

Horas totales:
7987h 33m 56s

Equipo operativamente listo para utilizarse.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

Equipo funcionando al 100%

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Gregorio Misael Tracheta Arias

NOMBRE:

[Firma]

NOMBRE:

FIRMA:

[Firma]

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA