



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO  
3381

CONTRATO: 019GYRO19N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No. 67

DIRECCIÓN: Col. Apodaca Centro 66600 Apodaca, Nuevo Leon

FECHA:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siore

MODELO:

Sioretron 4000

SERIE:

65304

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y  
ARRANQUE

MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO # 1

MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
750200001	Kit de mantenimiento		
196572000	2 Baterias 12V		
35R1191751	Celda de O <sub>2</sub>		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Pruebas (Service Manual Siore)

Aspecto Fisico: Ok  
Mangueras Aire/O<sub>2</sub>: Ok  
Cable Celda O<sub>2</sub>: Ok

Bloque Espiratorio: Ok  
Cable AC: Ok

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

Calibraciones:  
Celda de O<sub>2</sub>: 52 mV Ok  
Sensores de flujo respiratorio: Ok  
Prueba de flujo: 4 ml/min Ok  
Baterias: Ok

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

Horas Totales: 12522h 8m 4s  
Equipo operativamente apto para utilizarse.  
Equipo funcionando al 100%

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100%

FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Miguel  
Tracheza Arias

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:  
MATRICULA:  
CARGO:

NOMBRE:

FIRMA:  
MATRICULA:  
CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO  
0683

CONTRATO: 019GYR019N1924-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67

DIRECCIÓN: col. Apodaca Centro 66600, Apodaca, Nuevo Leon

FECHA: FOLIO ODS: 3381

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Soretron 4000 SERIE: 65304 INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1  MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R5020001	Kit de mantenimiento		
E96512000	2 Baterias 12V		
PER119113	Celda de O2		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

Aspecto Fisico: OK Bloque Espiratorio: OK  
Mangueras Aire/O2: OK Cable AC: OK  
Cable Celda O2: OK

Calibraciones:  
Celda de O2 52 mV OK  
Sensores de flujo respiratorio: OK  
Prueba de fugas: 4 ml/min OK  
Baterias: OK Horas totales: 12522h 3m 4s

Equipo operativamente apto para utilizarse.  
Falso funcionando al 100%

ESTATUS DEL EQUIPO  FUNCIONAL AL 100%  FUERA DE SERVICIO  EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Hissael Lacheta Arias  
FIRMA: [Signature]  
NOMBRE: [Blank]  
FIRMA: [Blank]  
MATRICULA: [Blank]  
CARGO: [Blank]

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA