



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3074

CONTRATO: 01964R019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona N132

DIRECCIÓN: Calzada del Horno Coahuila, Coahuila 01980 CdMx

FECHA: 14 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Sare	MODELO: Sareben 4000	SERIE: 65710	INVENTARIO: 511
-------------	----------------------	--------------	-----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO:
---	--	---	-------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R30/000A1	Kit mantenimiento de 00/15'		
96512000	2 baterías 12V 1.3Ah		
70078A	Regulador con tiempo de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba Servo Manual Sare


- Aspirador fuera OK ✓ Buro
- Manguera Aire O₂ OK ✓
- Cable O₂ OK ✓
- Plague respiratorio OK ✓
- Cable AC OK ✓

- Calibración
- Celda O₂ 48mV OK ✓
- Sensor de flujo respiratorio OK ✓
- Puerto de flujo 2ml/min OK ✓
- Voltaje de baterías 13.8 V OK ✓
- Horas tabla 10734h 55m7s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

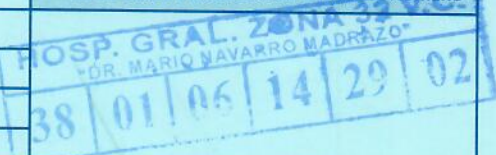

ESTATUS DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%	<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
--------------------	---	--	--

NOMBRE: Ing. Ericka Melina Larañoliz A. Lopez	NOMBRE: Dr. Osmaya Madrano A. Isabel Román Coord. Clínica de Medicina Interna MATRICULA: Mat. 99385873 CARGO: Céd. Prof. 4412393	NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 MATRICULA: DR. MARIO MADRAZO NAVARRO MAT. 99372344
--	---	--

INGENIERO DE SERVICIO	USUARIO DEL EQUIPO	JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA
-----------------------	--------------------	----------------------------------



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3059

CONTRATO: 019642019N1874-003-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32
DIRECCIÓN: Calzada del Hueso Coahuila, Coahuila 01980 CDMX
FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siaretron 4000 SERIE: 65490 INVENTARIO: SII

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R50200A1	Kit mantenimiento 4000 15"		
19652000	2 baterías 12V 1.3Ah		
REGT2A	Regulador con temporizador		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba (Service Manual Siare)

- Aparato físico OK ✓ Puro
- Mangos Aire/O₂ OK ✓
- Cable de oxígeno OK ✓
- Bloque espiratorio OK ✓
- Cable AC OK ✓

- Calibraciones
- Celda para O₂ 48mV
 - Sistema de flujo respiratorio OK ✓
 - Purba de fugas 4 milimo OK ✓
 - Voltaje de baterías 13.6V OK ✓
 - Horas totales 7599h 21m 39s



SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%.
Equipo funcionando al 100%.



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Iny Cristian Martín Hernández Alfaro
FIRMA: _____

NOMBRE: Dr. Osca Misael Camacho Medina
FIRMA: _____
MATRICULA: 4412353
CARGO: INVS

NOMBRE: OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: _____
MATRICULA: MAT. 99372344
CARGO: JEFE DE CONSERVACION

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3073

CONTRATO: 01964R 019N182d -008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Hueso Coahuila, Cooperación 049801 Dlx

FECHA: 14 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Sartun 4000	SERIE: 65709	INVENTARIO: 51E
--------------	---------------------	--------------	-----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO:
---	--	---	-------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15020001	Kit mantenimiento 1000 15"		
9652000	2 baterías DV 1.3Ah		
26672A	Regulador en tiempo de carga		


ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 95 tabla preliminar de prueba Service Manual Siare

- Apretado Asiro OK Birras
- Máscara Air Oz OK
- Cable Oz OK
- Placer respiratorio OK
- Cable Ar OK

- Calibraciones
- Calcula Oz 50ml OK
 - Prueba de flujo respiratorio OK
 - Prueba de flujo 0ml/min OK
 - Verifica de baterías 13.8 VOK
 - Horas totales 9737h 7m 17s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

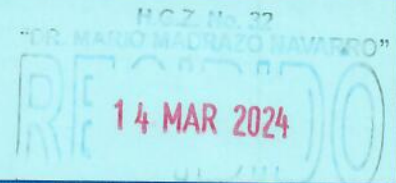

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%	<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
--------------------	---	--	--

NOMBRE: Ing. Castro Martín Hernández Alfaro

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: Dr. Osmary Medrano Albeel Romo

FIRMA: [Signature]

MATRÍCULA: Coord. Clínica de Medicina Interna Mat. 99385873

CARGO: Céd. Prof. 4412393

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA

FIRMA: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32

MATRÍCULA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

CARGO: MAT. 993725-44

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3058

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
DIRECCIÓN: Calz del Huevo Grande, Capatzen 04950 (DUX)
FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Sarton 4000 SERIE: 65407 INVENTARIO: S/I

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kil mantenimiento 40015"		
E96512000	2 baterías 12V 1.3Ah		
RF6TRA	Regulador en tiempo de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla preliminar de prueba (Service Manual Siare)

- Aspecto físico de Boma
- Mangueras Air 102 OK
- Cable de oxígeno OK
- Bloque espiratorio OK
- Cable AC OK

Calibraciones

- Celda para O₂ 50mV
- Sensores de flujo respiratorio OK
- Prueba de fugas 2 ml/min OK
- Voltaje de baterías 13.7V OK
- Horas totales 6618h 52m 35s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
REVISADO
12 MAR 2024
JEF. DE CONSERVACION

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%.
Equipo funcionando al 100%

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cristian Martín Hernández Alfaro
FIRMA:

NOMBRE: Dr. Oscar Misael Camacho Medina
FIRMA:
MATRÍCULA:
CARGO: JEFE DE CONSERVACION

NOMBRE: _____
FIRMA:
MATRÍCULA: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32
CARGO: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3057

CONTRATO: 019642019N1824-008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
DIRECCIÓN: Calz. Hueso Coahuila, Coahuila 04980 CDMX
FECHA: 11 Marzo 2024

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siarc MODELO: Siarc bon 4000 SERIE: 65365 INVENTARIO: S/I

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R50200A1	Kit mantenimiento 4000 15"	/	/
F9652000	2 baterías 12V 1.3Ah	/	/
RT6TRA	Regulador con temporizador	/	/

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba (Service Manual Siarc)

- Apretado fijas OK ✓ Borno
- Mangueras Air 102 OK ✓
- Cable origen OK ✓
- Bloque respiratorio OK ✓
- Cable AC OK ✓

Calibraciones
• Celda para O2 51mV
• Sensores de flujo respiratorio OK ✓
• Prueba de flujo 2ml/min OK ✓
• Voltaje de baterías 13.6V OK ✓
• Horas totales 9 835h 23m 12s



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%.
Equipo funcionando al 100%.



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro	NOMBRE: Dr. Osmary Medrano Rodríguez Román	NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344
FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Blank]	MATRICULA: CAS. Prof. MEX 2011 IMSS	MATRICULA: [Blank]
CARGO: [Blank]	CARGO: [Blank]	CARGO: [Blank]

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3056

CONTRATO: 096YR019U1824-008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32
DIRECCIÓN: Calz del Hueso Frasco, Capatzen AHO CMX
FECHA: 11 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siarction 4000 SERIE: 65334 INVENTARIO: S/I

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2502000A1	Kit mantenimiento 4000 15"	/	/
196512000	2 baterías (12V 13Ah)	/	/
600435000	Sensor de flujo respiratorio	/	/
/	/	/	/

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba (Service manual siare)

Agua de flujo de agua OK ✓ • Bloque respiratorio OK ✓
Manguera Aire O2 OK ✓ • Cable AC OK ✓
Cable origen OK ✓

Calibración
• Celda para O2 49 mV OK ✓
• Sensores de flujo respiratorio OK ✓
• Prueba de fugas 2 ml/min OK ✓
• Voltaje de baterías 13.7V OK ✓
• Horas totales 9092 h 51m 22s OK ✓

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RE 11 MAR 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%.
Equipo funcionando al 100%.

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro

NOMBRE: Dr. Osmary Medrano Alcocer Román

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____
MATRICULA: CBO Prof. 4412343
CARGO: _____

FIRMA: OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
MATRICULA: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32
CARGO: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3055

CONTRATO: 01964R019N1824008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
DIRECCIÓN: Calz. del Hueso Blanco, Corporación del 950 CDMX
FECHA: 11 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siaretron 4000 SERIE: 65156 INVENTARIO: S/I

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2502000A1	Kit mantenimiento 4000 IS		
P32-11-9171	Sensor de oxígeno		
46512000	2 baterías (12V 1.3Ah)		
600435000	Sensor de flujo respiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla preliminar de prueba (Service Manual Siare)

- Aparato físico OK ✓ Borno
- Manómetro Aire O₂: OK ✓
- Cable oxígeno OK ✓
- Placa respiratorio de Reemplazo
- Cable AC OK ✓

- Calibraciones
- Tabla para O₂ (48mV) OK ✓
- Sensores de flujo respiratorio OK ✓
- Prueba de fugas (1ml/min) OK ✓
- Voltaje de baterías 13.6V OK ✓
- Horas totales 10242h 3dm 29s OK ✓

SELO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
11 MAR 2024
SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN

SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Oscar Misael Camacho Medina
Hernández Alfaro
FIRMA:

NOMBRE: Dr. Osmary Madrano Adbeel Román
FIRMA:
MATRICULA: 4412393
CARGO: Coadj. Prof. 4412393

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA:
MATRICULA: DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
CARGO: JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3061

CONTRATO: 019 64R 019 N1874-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horno Compa. Cooperación 04980 CDLX

FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Sicore MODELO: Sicoras 4000 SERIE: 65618 INVENTARIO: 511

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

Table with 4 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN. Includes items like 'Kit mantenimiento 400015', '2 baterías 12V 1.3Ah', and 'Regulador de tiempo de agua'.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba (Service Manual Sicore)

- Aspirato filtro OK ✓ Borno
Mangueras Aire 102 OK ✓
Cable original OK ✓
Blaque respiratorio OK ✓
Cable AC OK ✓

Calibraciones

- Celda para O2 52 mV OK ✓
Sensores de flujo respiratorio OK ✓
Prueba de fugas 2ml/min OK ✓
Voltaje de baterías 13.7V OK ✓
Horas totales 5348h 34m 2s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 32
DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
RECEBIDO
12 MAR 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%
(Equipo funcionando al 100%)

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
DR. MARIO NAVARRO MADRAZO
38/01/06/14/29/02

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro

NOMBRE: Dr. Osmary Medina Adolfo Román

NOMBRE:

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]
MATRICULA: 442393
CARGO: [Title]

FIRMA: ING. OSCAR MIGUEL CAMACHO MEDINA
MATRICULA: DE UNIDAD H. G. Z. 32
CARGO: DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
MAT. 99372544

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3060

CONTRATO: 019642019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital Genad de Zona No.32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Coahuila, Caparcia 04980 CD/EX

FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Siareton 4000	SERIE: 65530	INVENTARIO: SIE
-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO:
---	--	---	-------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS0200A1	Kit mantenimiento 4000 15"		
19652000	2 baterías 12V 1.3Ah		
REGTRA	Regulador con temporizador		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 95 Tabla procedimiento de parba (Service Manual Siare)

Aperto físico oxígeno - Bloque espiratoria OK

Manguera Air 102 OK - Cable AC OK

Cable de oxígeno OK

Calibraciones

- Celda para O2 5.0 OK
- Sensores de flujo respiratoria OK
- Prueba de flujo 2 ml/min OK
- Voltaje de batería 13.6V OK
- Horas totales 9937 h 12m 37s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 27
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
12 MAR 2024
JULUL
DE CONSERVACION

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%.

Equipo funcionando al 100%

HOSP. GENAL. ZONA
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%	<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
--------------------	---	--	--

NOMBRE: Ing Cristian Martín Hernández Aranda

NOMBRE: Dr. Oscar Misael Galacho Medina

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

MATRÍCULA: Céd. Prof. 12393

MATRÍCULA:

CARGO:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3062

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Coahuila, Coahuila 24980 CDMX

FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Siaretron 4000	SERIE: 65619	INVENTARIO: S/I
--------------	------------------------	--------------	-----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO:
---	--	---	-------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1502000A	Kit mantenimiento 4000 15"	/	/
1652000	2 baterías 12V 1.3Ah	/	/
REGTRA	Regulador con temporizador de agua	/	/

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba Service Manual Siare

- Aparto físico OK ✓ Buzo
- Manguera Aire 102 OK ✓
- Cable oxígeno OK ✓
- Bloque respiratorio OK ✓
- Cable AC OK ✓

Calibraciones

- Celda para Pz 48mV OK ✓
- Sensores de flujo respiratorio OK ✓
- Prueba de fugas 2ml/min OK ✓
- Voltaje de baterías 13.8V OK ✓
- Horas totales 10316h 45m 23s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECIBIDO
12 MAR 2024
SECRETARÍA DE SALUD

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 | 01 | 06 | 14 | 29 | 0

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Crisithen Martín Hernández Alfaro

NOMBRE: Dr. Omaya Madrazo Isabel Román
FIRMA: [Firma]
MATRÍCULA: 99373
CARGO: [Cargo]

NOMBRE: ING. OSCAR M. SAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: [Firma]
MATRÍCULA: JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD H. G. Z. 32
CARGO: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3066

CONTRATO: 01964 2019 N1824 - 008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
DIRECCIÓN: Calz del Hueso Coapa, Capación 04980 CDLX
FECHA: 13 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siarhand000 SERIE: 65636 INVENTARIO: SII

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kit mantenimiento de 15"		
946517000	7 baterías 12V 1.3Ah		
600435000	Sensor de flujo espiratorio		
73100020	Sensor de flujo inspiratorio		
REGARPA	Regulador de temperatura de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla para el inicio de prueba Service Manual Siare

- Apertura física OK ✓ Bien
- Bloque espiratorio OK / Reemplazo
- Válvulas Aire O₂ OK ✓
- Cable A C OK ✓
- Cable oxígeno OK ✓

Calibraciones

- Calibración O₂ 50 OK ✓
- Sensores de flujo respiratorio OK ✓
- Prueba de fugas 4 ml/min OK ✓
- Voltaje de baterías 13.8 V OK ✓
- Horas totales 9027 h 52 m 30

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Stamp]
CARGO: [Stamp]

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Stamp]
CARGO: JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD H. G. Z. 32 DR. MARCO NAVARRO MADRZO MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3065

CONTRATO: 019 64RG19N18 24-008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
DIRECCIÓN: Calzada del Hueso Coapa, Capación 04980 CDMX
FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siarr MODELO: Siarrhcn 4000 SERIE: 65627 INVENTARIO: S II

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R50200A1	Kit mantenimiento 400015		
E96512020	7 baterías 12V 1.3Ah		
R1672A	Regulador con tiempo de aya		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba (Service Manual Siarr)

- Aspecto físico OK Bueno
- Mangueras Aire O2 OK
- Cable O2 OK
- Blogera capilaria OK
- Cable AC OK

Calibraciones

- Celda para O2 50mV OK
- Sensores de flujo respiratorio OK
- Prueba de flujo 0ml/min OK
- Voltaje de batería 13.8V OK
- Horas tablero 11269h 14m 37s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cristian Martín Hernández Alfaro NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CANASO MEDINA

FIRMA: [Signature] FIRMA: [Signature] FIRMA: [Signature]

MATRICULA: [Blank] MATRICULA: [Blank] MATRICULA: [Blank]

CARGO: [Blank] CARGO: Coord. Clínica de Medicina Interna CARGO: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32

[Logos: IMSS, etc.] [Logo: IMSS]

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3064

CONTRATO: 01964R 019N 1874-008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona 32
DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Coapa, Capatzen 04980 CDMX
FECHA: 17 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Diave MODELO: Sianton 4000 SERIE: 65626 INVENTARIO: 517

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
250200A	Kit mantenimiento 400015		
46512000	7 baterías 12V 1.3Ah		
REGTRA	Raylador con bandeja de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba (Service Manual Siret)

- Aparato físico OK / Buena
- Manómetro Aire 102 OK
- Cable de O₂ OK
- Plaque capacitancia OK
- Cable AC OK

Calibraciones

- Celda para O₂ 54 mV OK
- Senzora de flujo respiratoria OK
- Prueba de flujo 1ml/min OK
- Voltaje de Baterías 13.7V OK
- Horas totales 9353 h 7m 47s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RE 12 MAR 2024
CONSERVACIÓN

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro
FIRMA:

NOMBRE: Dr. Osmaya Medrano Adbeel Román
FIRMA:
MATRICULA: Coahuila, Clínica de Medicina Interna, Mat. 99385873
CARGO: Céd. Prof. 4412393 IMSS

NOMBRE: NG. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD H. G. Z. 32
FIRMA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MATRICULA: MAT. 99372344
CARGO: _____

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3063

CONTRATO: 01964R 019 N 1824 - 008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 1b32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Coque, Capatzen 01980 C.M.X

FECHA: 12 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Starton 4000	SERIE: 65625	INVENTARIO: 51I
--------------	----------------------	--------------	-----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: _____
---	--	---	-------------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R507000A1	Kit mantenimiento 4000 13"		
96517000	2 baterías 12V 1.3Ah		
REGTRA	Regulador con temporizador		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 95 Tabla procedimiento de prueba Mantenimiento Service Manual Siare

- Aparato físico OK - Bueno
- Bloque espiratorio OK
- Manos Air 10 OK
- Cable AC OK
- Cable de oxígeno OK

Calibraciones

- Celda para O₂ 50mV
- Tiempo de flujo espiratorio OK
- Prueba de flujo 2ml/min OK
- Voltaje baterías 13.8V OK
- Horas totales 10374 h 41m 50s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%	<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
--------------------	---	--	--

NOMBRE: Ing. Custodio Martín Hernández Alfaro

FIRMA: _____

NOMBRE: _____
 FIRMA: *Osmaya Mercedes Radeel Román*
 MATRÍCULA: 001065873
 CARGO: _____

NOMBRE: **ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA**
 JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32
 FIRMA: _____
 MATRÍCULA: **DR. MARIO MADRAZO NAVARRO**
 MAT. 99372344
 CARGO: _____

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3072

CONTRATO: 019 642 019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 2632

DIRECCIÓN: Calzada del Hueso Coapa, Capatzen 04980 CDMX

FECHA: 14 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Jiare	MODELO: Sprinter 4000	SERIE: 65707	INVENTARIO: 01I
--------------	-----------------------	--------------	-----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: _____
---	--	---	-------------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kil. de mantenimiento 400013"		
196312000	2 baterías 12V 13Ah		
PESTPA	Regulador de tiempo de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento de acuerdo a 95Takt procedimiento de prueba Service Manual Jiare

- Aspireta filtro OK/Bueno
- Manguera Aire O₂ OK
- Filtro O₂ OK
- Plaque respiratorio OK
- Cables AC OK

Calibraciones

- Calda O₂ 49mV OK
- Sensor de flujo respiratorio OK
- Purba de flujo 6milima OK
- Voltaje de baterías 13.8V OK
- Horas totales 6766h 55m 23s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 2632
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
RECEBIDO
14 MAR 2024
CONSERVACION

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 2632
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%	<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
--------------------	---	--	--

NOMBRE: Ingridis Carolina Hernández
FIRMA: _____

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román
FIRMA: _____
MATRICULA: _____
CARGO: _____

NOMBRE: ING. OSCAR ISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 2632
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344
FIRMA: _____
MATRICULA: _____
CARGO: _____

INGENIERO DE SERVICIO	USUARIO DEL EQUIPO	JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA
-----------------------	--------------------	----------------------------------



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3071

CONTRATO: 1964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Grande, Guaymas 04980CDMX

FECHA: 14 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Starc

MODELO:

Starchar-1000

SERIE:

65691

INVENTARIO:

5 II

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y
ARRANQUE



MANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1



MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
250700000	Lit de mantenimiento 4000		
196512000	2 baterías 12V 1.2 Ah		
73100020	Sensor de flujo inspiratorio		
PRATRA	Regulador en tiempo de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla predominante de pruebas Service Manual Starc

- Aparato fuera de Buro OK
- Manguera Aire O₂ OK
- Cable O₂ OK

- Bloque respiratorio OK
- Cable Ac OK

Calibraciones

- Celda O₂ 53 mV OK
- Sensor de flujo respiratorio OK
- Prueba de flujo 3 ml/min OK
- Voltaje de Baterías 13.8 V OK
- Horas totales 9719h 39m 19s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
14 MAR 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"

38 | 01 | 06 | 14 | 29 | 02

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro

NOMBRE:

Dr. Osmary Medrano Aabeel Román

NOMBRE: OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA

JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32

"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

FIRMA:

FIRMA:

Coord. Clínica de Medicina Interna
Mat. 99385873

MATRICULA: Céd. Prof. 4412393

CARGO: IMSS

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3070

CONTRATO: 01964R019N1324-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Coapa, Colaparcas 01480 CDMX

FECHA: 14 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Diare MODELO: Diarbond4000 SERIE: 65661 INVENTARIO: SII

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: _____

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KS0200A1	Kit mantenimiento 400015	/	/
1965R000	7 baterías 12V 1.3Ah	/	/
REGTEA	Regulador de tiempo de agua	/	/

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 95 Tabla procedimiento de prueba Service Manual Diare

- Aparato listo OK Bueno
- Bloque espiratorio OK ✓
- Mangueras Aire O₂ OK ✓
- Cable AC OK ✓
- Cable O₂ OK ✓

- Calibraciones
- Salida O₂ 52 mV OK ✓
- Sensor de flujo espiratorio OK ✓
- Presión de fugas 1ml/min OK ✓
- Voltaje de baterías 13.8V OK ✓
- Horas totales 5681h 39m 4s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

14 MAR 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian García Hernández Alfaro

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA

FIRMA: _____

FIRMA: _____
MATRICULA: _____
CARGO: _____

FIRMA: _____
MATRICULA: _____
CARGO: _____

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3069

CONTRATO: 019 642019 0187d-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Herpe Campo, Coahuila 64980 CONA

FECHA: 13 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siarton 1000 SERIE: 65654 INVENTARIO: 317

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE [] MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1 [x] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [] OTRO: []

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

Table with 4 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN. Includes items like Kit mantenimiento 4000 15", 2 baterías 12V 1.3Ah, and Resistencia con tiempo de agua.


ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba Servo Manual Siare

- Aspecto físico OK ✓
Mangueras Agua Ox. OK
Cable original OK
Bbqne espiratorio OK
Cable AC OK

- Calibraciones
Celda O2 50mV OK
Sensor de flujo respiratorio OK
Prueba de flujo 2ml/min OK
Voltaje de baterías 13.8V OK
Horas totales 5681h, 39 m ds

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

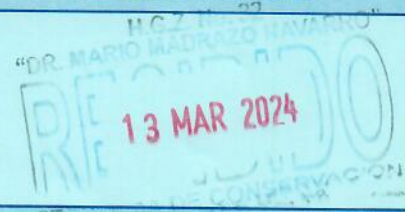

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO: [x] FUNCIONAL AL 100% [] FUERA DE SERVICIO [] EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cristian Medina
FIRMA: [Signature]

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Albeel Romo
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: 99385873
CARGO: Céd. Prof. 4412393

NOMBRE: OSCAR N'SAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3068

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Héroes Campe, Capatzen Acajucal, D.F.

FECHA: 13 Marzo 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Siarehond4000	SERIE: 65650	INVENTARIO: 515
--------------	-----------------------	--------------	-----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: _____
---	--	---	-------------

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R50200A1	Kit mantenimiento 4000 15"		
196512000	7 baterías 12V 1.3Ah		
F73100070	Sensor de flujo inspiratorio		
R6672A	Regulador de tiempo de flujo		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla de procedimiento de prueba. Se vea Manual Siare

- Aparato listo OK Breve
- Mangueras Aire 10r OK
- Cable oxígeno OK
- Bloque respiratorio OK
- Cable AC OK

- Calibraciones
- Filtro O₂ 5l/min OK
- Sensores de flujo inspiratorio OK
- Prueba de flujo 2ml/min OK
- Voltaje de baterías 13.8 V OK
- Horas totales 9195 h 39 m 43 s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

RECIBIDO

13 MAR 2024

UNIDAD DE CONSERVACION

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32

"DR. MARIO NAVARRO MADRIZO"

38 01 06 14 29 02

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cristian Marcha Hernández Arce

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE: NG OSCAR ITZ'AFI GAMACHO MEDINA

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]

MATRICULA: [Matrícula]

CARGO: Cood. Clínica de Medicina Intensiva
Tel. 99385873
Ced. Prof. 4412393

FIRMA: [Firma]

MATRICULA: [Matrícula]

CARGO: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3067

CONTRATO: 019642019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Cabecera del Hueso Compa, Carretera 04980 (DML)

FECHA: 13 Marzo 2024

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siartan 4000

SERIE:

65638

INVENTARIO:

512

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R50200A1	Kit mantenimiento 4000/5"		
96512000	2 baterías 12V 1.3Ah		
PROTEA	Daytaber en tiempo de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba service Manual Siare

• Aparato físico OK ✓

• Bloque respiratorio OK ✓

• Mangueras Air O₂ OK ✓

• Cable AC OK ✓

• Cable oxígeno OK ✓

Calibraciones

• Calda de O₂ 58 mV OK ✓

• Señales de flujo respiratorio OK ✓

• Purga de fugas 4 ml/min OK ✓

• Voltaje de baterías 13.7 V OK ✓


• Horas totales @ 976h 9m 18s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

El equipo queda operativamente apto al 100%.
Equipo funcionando al 100%.

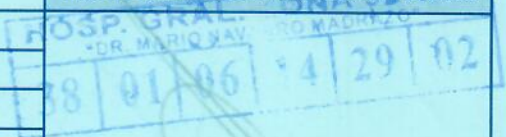

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100%

FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Alfaro

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Albeel Romo

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Stamp]
CARGO: [Stamp]

FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Stamp]
CARGO: [Stamp]

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA