



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 02/07/2024	Fecha fin 02/07/2024	Folio Nº 274
Hora inicio 10:00	Hora fin 14:00	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/MP No.1 IMSS		Marca DTM	
Dirección Av. Plan de Ayala Cuauhnahuac. 62430, Cuernavaca, Mor.		Modelo bits 1.0	
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTU12020-0403	


Equipo: Ventilador de Terapia Intensiva N. Contrato: 01964R019N1824-003-00

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	<p>Se realiza inspección general del equipo encontrándose en una bodega con presencia de polvo.</p> <p>Se realiza limpieza y desinfección general</p> <p>Se realiza el segundo mantenimiento preventivo</p> <p>Se desactiva pantalla ELO</p> <p>Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios</p> <p>El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% Funcional</p>
Equipo funcionando correctamente <input checked="" type="checkbox"/>	

180601 142902
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/MP NO. 1

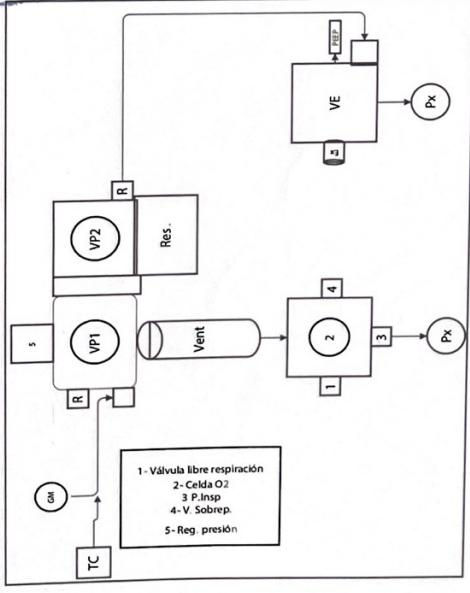

Refacciones y consumibles	
Cantidad	Cantidad
<input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	<input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox Ø7.5
<input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40x40
<input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
<input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
<input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input checked="" type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6
<input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
<input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
<input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	<input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito

Otros:
1 pra kit Biok-046-1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA EN MORELOS
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRALES.
 JULIO H. DOMINGUEZ ALAMOS
 Jefe de Conservación de Unidad 1
 Mat. 9401008

Aprobó

Realizó

[Signature]
 Inhaloterapia Oscar Pardo
 02-07-24 9818027E

[Signature]
 Maximiliano Brant Gómez



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VICENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 02-07-2024	Fecha fin 02-07-2024	Folio No 277
Hora inicio 14:02	Hora fin 16:40	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/ME No.1	Marca DTM	Modelo Gátsi 1.0	No. de serie GTU12020-0481
Dirección Av. Plan de Ayala, Cuernavaca, 62430, Cuernavaca, Morelos	Modelo Gátsi 1.0		
Solicitante	Teléfono		

Equipo: Ventilador de terapia intensiva Número de contrato: 0196YR019N1824-003-00

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico:

180601142902

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/ME


El equipo se encuentra en bodega con presencia de polvo. Se realiza inspección general del equipo encontrándose en buen estado. Se realiza el segundo mantenimiento preventivo. Los resultados de la verificación de desempeño fueron satisfactorios. El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% Funcional.

Equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Cantidad		Cantidad
<input type="checkbox"/>	MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0110 Escuadra 40-40	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0113 Tuerca con collar M6	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0114 Tornillo inox. CI. M6x16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0007 Gancho porta circuito	<input type="checkbox"/>

Otros: Kit BIOC-0146-1

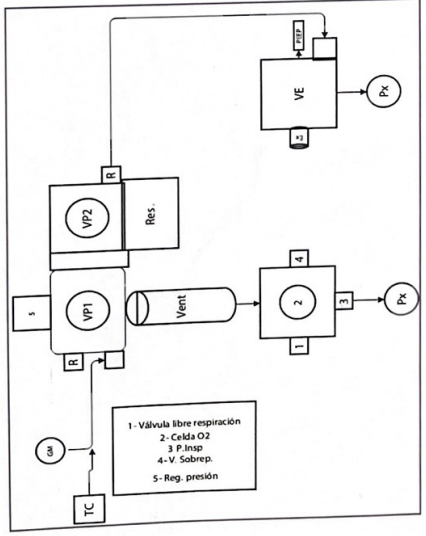

IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONGENTRADA EN MORELOS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRALS.

JULIO H. DOMÍNGUEZ ALAMOS
Jefe de Conservación de Unidad 1
Mat. 9401008

Aprobó

Inhaloterapia Oscar Ramos
07-07-24 98180276

Realizó

IBM Pablo Francisco Bizo Vilchis



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 01-07-2024	Fecha fin 01-07-2024	Folio N° 273
Hora inicio 16:45	Hora fin 19:10	No. de reporte UA

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/ME No.1	Marca DTM	Dirección Av. Plan de Ayala, Cuauhchuar, 62430, Cuernavaca, Mor.	Modelo Gáitsi 1.0
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTV12020-0482	

Equipo: Ventilador de terapia intensiva Número de contrato: 0196YR019N1824-003-00


Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico:

1 8 0 6 0 1 1 4 2 9 0 2
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/ME NO. 1

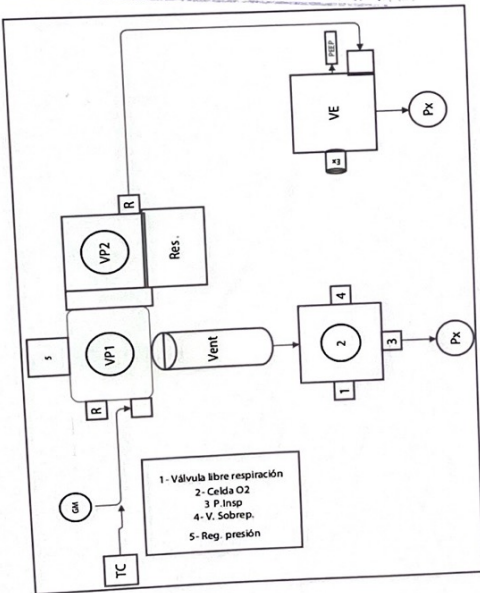

El equipo se encuentra en bodega con presencia de pdvo
 Se realiza inspección general del equipo encontrándose en bien estado.
 Se realiza el segundo mantenimiento preventivo
 Los resultados de la verificación de desempeño fueron satisfactorios
 El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% funcional
 El equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Cantidad	Refacción	Cantidad
<input type="checkbox"/>	MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0109 Malla de acero inox. 07.5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0110 Escuadra 40-40	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0141 Tapa escuadra 40x40 gris	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0113 Tuerca con collar M6	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0028 Arandelá helicoidal de presión M6	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MR-0007 Gancho porta circuito	<input type="checkbox"/>

Otros: Kit B10K-0146

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA EN MORELOS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRALS.
 JULIO H. DOMÍNGUEZ ALAMOS
 Jefe de Conservación de Unidad 1
 Mat. 9401008

Aprobó

Inhaloterapia Oscar Romas
 01-07-24 98180276

Realizó

IBM Francisco Rizo Vilchis

Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

DYDETEC®

Fecha inicio 01/07/2024	Fecha fin 01/07/2024	Folio Nº 270
Hora inicio 14:00	Hora fin 16:30	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/MF No. 1 IMSS	Marca DYDETEC®	Modelo GATSI 1.0	No. de serie GTVI2020-0486
Dirección Av. Plan de Ayala, Cuernavaca, 62430 Cuernavaca, Mor.	Solicitante	Ubicación	Teléfono

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:


Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección general del equipo encontrándose en buen estado
 Se realiza limpieza y desinfección interna
 Se realiza mantenimiento preventivo
 Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios
 El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en el mantenimiento preventivo - 100% Funcional

Equipo funcionando correctamente

Diagnóstico: **180601 142902**
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/MF NO. 1

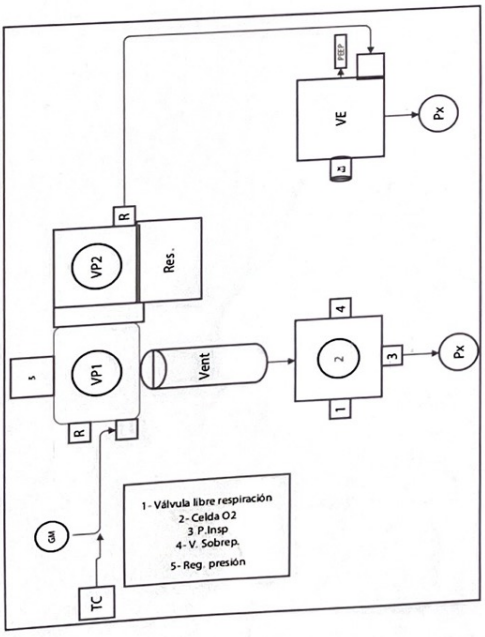

Refacciones y consumibles		Cantidad
<input type="checkbox"/> MP-0002 Batería 12 V 17 ah	<input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5	
<input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40x40	
<input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	
<input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	
<input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6	
<input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	
<input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input checked="" type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	
<input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	<input checked="" type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito	

Otros:
 1pa Kit B10K-0146-1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA EN MORELOS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRLS.
JULIO H. DOMINGUEZ ALAMOS
 Jefe de Conservación de Unidad 1
 Mat. 9401008

01-07-24 Aprobó
Inhaloterapia
 Oscar Ramos
 98180276

Realizó
Maximiliano Bernal Gómez



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 03/07/2024	Fecha fin 03/07/2024	Folio Nº 279
Hora inicio	Hora fin	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/MP No. 1 IMSS		Marca DTM	
Dirección Av. Plan de Ayala, Cuauhnahuac, 62430, Cuernavaca, Mor		Modelo Gätsi 1.0	
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTU12020-0487	

Equipo: **Ventilador de Terapia Intensiva** N. Contrato: **019649019 NIB 24-003-00**


Datos del servicio	
Ubicación en hospital Urgencias Pediatría	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input type="checkbox"/> Fluke VT900	<input type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input type="checkbox"/>	Extracción de logs <input type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico:
180601 142902
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/MP NO.

El equipo se encuentra en uso por paciente, debido a esto se reprograma la Fecha del segundo mantenimiento preventivo a la semana 28 del año en curso.

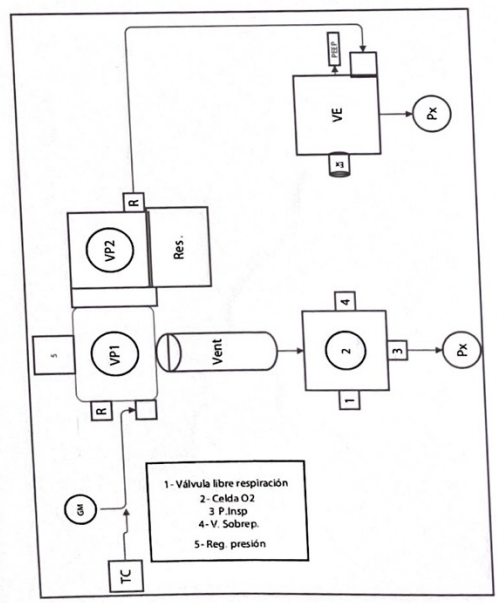

Equipo funcionando correctamente

HOSPITAL GENERAL REGIONAL HGR. C/MP NO. 1 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

Refacciones y consumibles

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah | <input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 |
| <input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana | <input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40 |
| <input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío | <input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris |
| <input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno | <input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 |
| <input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg | <input type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6 |
| <input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio | <input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 |
| <input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm | <input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 |
| <input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m | <input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito |

Otros:

Aprobó

Realizó

Osca Ramos

Maximiliano Benjal Gómez

03 JUL 2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA EN MORELOS
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRALES.
JULIO H. DOMÍNGUEZ ALAMOS
 Jefe de Conservación de Unidad 1
 Mat. 9401008



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 01-07-2024	Fecha fin 01-07-2024	Folio Nº 271
Hora inicio 14:00	Hora fin 16:30	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/MF No. 1	Marca DTM	Modelo Gätsi 1.0	
Dirección Av. Plan de Ayala, Cuauhpañuac, 62430 Cuernavaca, Mor	Teléfono	No. de serie GTV12020-0488	
Solicitante		Equipo: Ventilador de terapia intensiva Número de Contrato: 0196YR09N1824-003-00	
Datos del servicio			
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo	
Responsable (es)	<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Capacitación	
	<input type="checkbox"/> Actualización	<input type="checkbox"/> Otro:	

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico: **El equipo se encuentra en bodega con presencia de polvo. Se realiza inspección general del equipo encontrándose en buen estado. Se realiza el segundo mantenimiento preventivo. Se ejecuta la verificación de desempeño con resultados satisfactorios. El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% funcional.**


Equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Refacción	Cantidad	Cantidad
<input type="checkbox"/> MP-0002: Batería 12 v 17 ah		<input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5
<input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana		<input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40
<input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío		<input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
<input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno		<input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
<input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg		<input type="checkbox"/> MP-0113 Tuercas con collar M6
<input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio		<input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
<input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm		<input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela hexicoidal de presión M6
<input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m		<input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito

Otros: **Kit BLOK-0146-1**

180601 142902
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/MF NO. 1

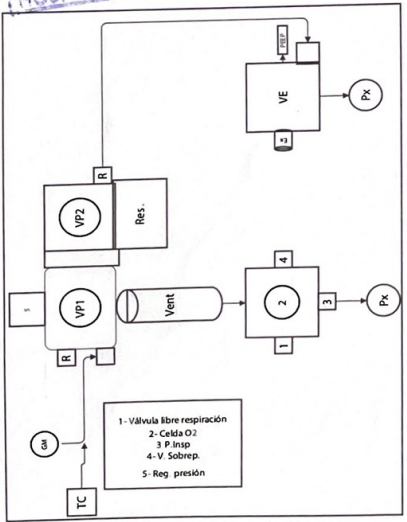

Aprobó
Inhaloterapia Oscar Ramos
01-07-24 98180276

Realizó
IBM Pablo Francisco Bizo Vilchis

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA EN MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRLS.
Autorizo
JULIO H. DOMINGUEZ ALAMOS
Jefe de Conservación de Unidad 1
Mat. 9401008

Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 02-07-2024	Fecha fin 02-07-2024	Folio Nº 275
Hora inicio 10:07	Hora fin 13:47	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/ME No. 1	Dirección Av. Plan de Ayala, Cuachnahuc, 62430, Cuernavaca, Morelos	Marca DTM	Modelo Gaitsi 1.0
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTV12020-0490	


Equipo: Ventilador de terapia intensiva Número de Contrato: 019GYR019N1824-003-00

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	Responsable (es)
<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300 <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas <input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/> Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de fugas
		<input checked="" type="checkbox"/> Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Diagnóstico:

180601 142902
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/ME NO. 1

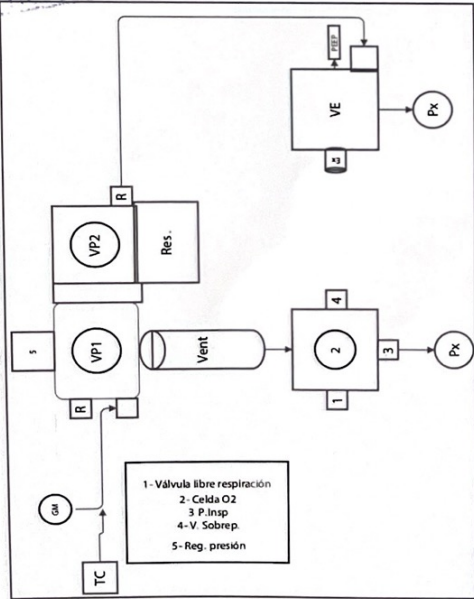

Descripción del servicio realizado

El equipo se encuentra en bodega con presencia de **plazo**
Se realiza inspección general del equipo, detectando anomalía en los tornillos del ensamble de conexión DISS y valores de VT: fuera de range. Se realiza el segundo mantenimiento preventivo, se reemplazan los tornillos del ensamble de conexión DISS y se calibra el sensor de flujo con ajuste de Kp. Se reemplaza regulador de presión de O2. Los resultados de la verificación de desempeño fueron satisfactorias. El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% funcional.
Equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

- | | | | |
|---|--|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah | <input checked="" type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 | Cantidad | Cantidad |
| <input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana | <input checked="" type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40 | | |
| <input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío | <input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris | | |
| <input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno | <input checked="" type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de manilla M6x16 | | |
| <input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg | <input checked="" type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6 | | |
| <input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio | <input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 | | |
| <input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm | <input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 | | |
| <input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m | <input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito | | |

Otros: Kit B10K-0146-1 (1 pza)
MP-0037 (2 pzas)
MP-0300 (1 pza)

Aprobó

Realizó

02-07-24
Osca Ramos 18180276
D polvo, P. Rizo, 02-07-2024

LBM Pablo Francisco Rizo





Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 02/07/2024	Fecha fin 02/07/2024	Folio N° 276
Hora inicio 15:00	Hora fin 18:00	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/ME No.1. IMSS	Marca DTM	Dirección Av. Plan de Ayala. Cuahuahua 62430, Cuernavaca, Mor	Modelo Gator 1.0
Solicitante	Teléfono	No. de serie 6TV12020-0491	


Equipo: Ventilador de Terapia Intensiva No. Contrato: 01964RO19N1824-003-00

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhabterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico 601 142902
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/ME NO

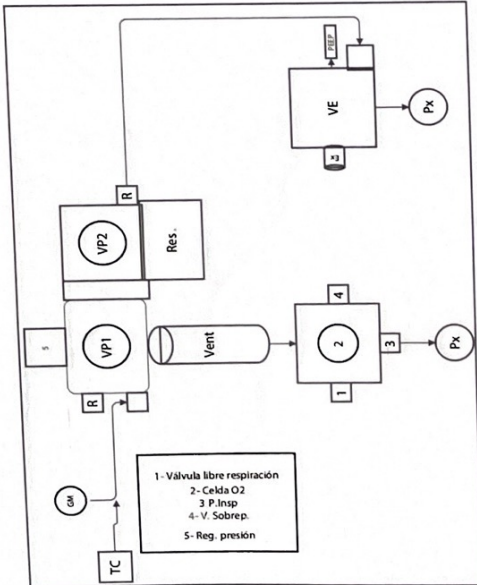

Se realiza inspección general del equipo encontrándose en buen estado.
 Se realiza limpieza y desinfección general
 Se realiza el segundo mantenimiento preventivo
 Se realiza mantenimiento correctivo sin necesidad de refacciones, con ajuste de Kp's
 Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios
 El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% funcional.

Equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Cantidad		Cantidad
<input type="checkbox"/>	MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0110 Escuadra 40-40	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0113 Tuerca con collar M6	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MP-0007 Gancho porta circuito	<input type="checkbox"/>

Otros:

1pa kit Bick -046-1

Aprobó

Realizó

Inhabterapia Oscar Lomas
 02-07-24 98180275

Maximiliano Bernal Gómez





Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 01/07/2024	Fecha fin 01/07/2024	Folio Nº 272
Hora inicio 17:00	Hora fin 19:00	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/ME No1 IMSS	Marca DTM	Modelo Gátsi 1.0	No. de serie GTV12020-0492
Dirección Av. Plan de Ayala, Cuauhahuac, 62430, Cuernavaca, Mor.	Solicitante	Teléfono	

Equipo: Ventilador de Terapia Intensiva N. Contacto: 01964R019N1824-003-00


Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico:

180601 142902
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/ME NO. 1

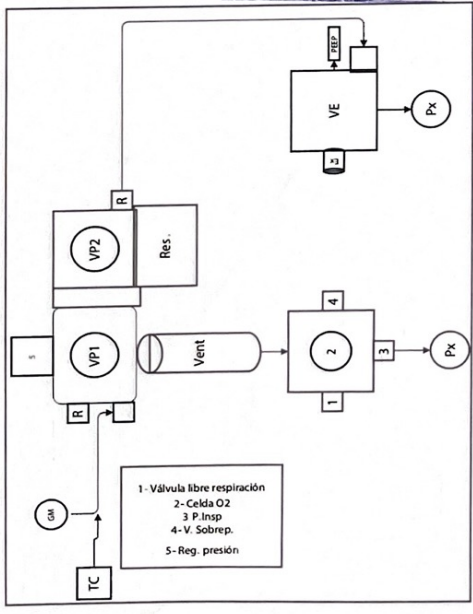

Se realiza inspección general del equipo encontrándose en una bodega con presencia de polvo.
 Se realiza limpieza y desinfección general.
 Se realiza mantenimiento preventivo.
 Se realiza ajuste de k/p's y completa tornillería de bloque espiratorio, y seguro de CA.
 Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios.
 El equipo queda operativamente apto para realizar al trabajo para lo que fue diseñado en el 2do Mantenimiento preventivo 100% Funcional.
 Equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Refacción	Cantidad	Refacción	Cantidad
<input type="checkbox"/> MP-0002 Batería 12v 17 ah		<input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5	
<input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana		<input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40	
<input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío		<input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	
<input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno		<input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	
<input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg		<input checked="" type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6	
<input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio		<input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	
<input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm		<input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	
<input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m		<input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito	

Otros:
 1 para Kit BIOC-0146-1
 2 para Tornillos Allen cil. inox

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA EN MORELOS
 MANIFIESTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRALES.
 JULIO H. DOMÍNGUEZ ALAMOS
 Jefe de Conservación de Unidad 1
 Mat. 9401008

Aprobó

Realizó

Inhaloterapia Oscar Ramos
 01-07-24

Maximiliano Bernal Gómez

Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000



FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 02-07-2024	Fecha fin 02-07-2024	Folio Nº 278
Hora inicio 17:49	Hora fin 20:09	No. de reporte N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre Hospital General Regional C/ME No.1	Marca DTM	Modelo Gátsi L-0	No. de serie GTV12020-0494
Dirección Av. Plan de Ayala, Cuauhnahuac, 62430, Cuernavaca, Morelos	Solicitante	Teléfono	

Equipo: Ventilador de terapia intensiva Número de contrato: 01964R019N1824-003-00


Datos del servicio	
Ubicación en hospital	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo <input checked="" type="checkbox"/> Fluke VT900	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de herramientas	Verificación de desempeño <input checked="" type="checkbox"/>	Extracción de logs <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300	<input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen	Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueo seguridad y botones <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Otro:	Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado

Diagnóstico:

180601 142902
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
HOSPITAL GENERAL REGIONAL C/ME NO. 1

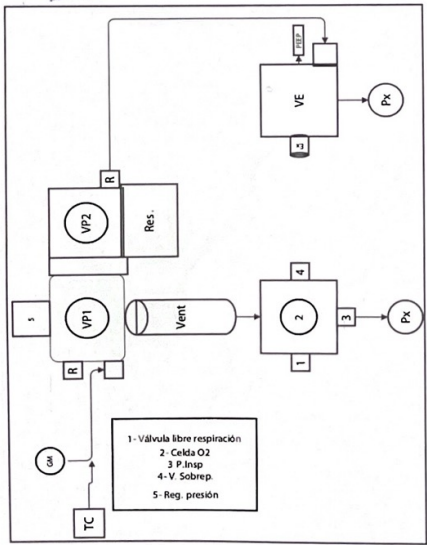

El equipo se encuentra en bodega con presencia de polvo. Se realiza inspección general del equipo encontrando que le hace falta un tornillo y tuerca de sujeción del arnés de comunicación. Se realiza el segundo mantenimiento preventivo, se coloca el tornillo y tuerca de sujeción del arnés de comunicación. Los resultados de la verificación de desempeño fueron satisfactorias. El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como 100% funcional. Equipo funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Cantidad	Refacción	Cantidad	Refacción
<input type="checkbox"/>	MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	<input type="checkbox"/>	MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5
<input type="checkbox"/>	VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/>	MP-0110 Escuadra 40-40
<input type="checkbox"/>	VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/>	MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
<input type="checkbox"/>	MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/>	MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
<input type="checkbox"/>	MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input checked="" type="checkbox"/>	MP-0113 Tuerca con collar M6
<input type="checkbox"/>	VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/>	MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
<input type="checkbox"/>	MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input type="checkbox"/>	MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
<input type="checkbox"/>	MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m	<input type="checkbox"/>	MP-0007 Gancho porta circuito

Otros: Kit BIOC-0146-1
MP-0033 (1 pza)
MP-0032 (1 pza)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA EN MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GRALS.
JULIO H. DOMÍNGUEZ ALAMOS
Jefe de Conservación de Unidad 1
Mat. 9401008

Aprobó *[Signature]*

Realizó *[Signature]*

Inhaloterapia Oscar Ramos

LABORATORIO DE INHALACIÓN